

フックホールド刃採用

确实粉碎

ボタンひとつで
カンタン操作。
水洗い可能で
カンタンお手入れ。



ユヤマ錠剤粉碎機

YM-200 II



ピッ!

カップセンサー
で安心



粉碎

約30秒後
停止

シンプルな
ボタン操作



0%

水洗いで清掃度アップ!
コンタミ防止



水洗いで清掃度アップ! コンタミ防止 PAT.P

リニューアルして、水洗いも可能になりました。
付着した汚れをキレイに洗い流し、コンタミの防止を実現。これまでの拭き掃除から解放され、清掃にかかる時間も大幅に短縮できます。

※化粧板の裏側は水に濡らさないようご注意ください。



粉碎機上部を化粧板とカッター刃、カップに分解すれば、水洗いの準備はOK。

※手で取り外すことも可能ですが、取り外しにくい時のために治具もご用意しております。
※水洗いはネジを締めて行ってください。



シンプルなボタン操作

錠剤をセットしたら、粉碎ボタンを長押しで運転スタート。ユヤマ独自のR状のフック・ホールド刃が、錠剤をいち早く捉えます。
粉碎が足りない場合も、任意の時間だけ追加で粉碎していただくことが可能です。



カップセンサーで安心

カップセンサーの埋め込みにより、固定位置まではまっていないと運転しない仕組みを採用。
はまると「ピッ!」という音でお知らせします。
万一、運転中にカップがゆるくなってしまった場合も、センサーが感知して運転をストップしますので、安心してお使いいただけます。



ユヤマ錠剤粉碎機 YM-200II

仕様

型式	YM-200II
寸法	W128mm × D171mm × H256mm
電源	AC100V ±10V 50/60Hz
消費電力	300W

回転数	16,320rpm以上
質量	3.5kg
定格時間	連続使用1分以内*

※連続使用時は、使用後に5分程度の間隔を空けてください。
(本機が高温状態のまま使用すると、錠剤が溶ける恐れがあります。)

〈設置上のご注意〉

- アースを必ず接続してください。●直射日光の当たる窓際に設置しないでください。
- 水平に設置してください。

Your Partner in Medication



製造元 湯山製薬所 株式会社

発売元 ヨヤマ 株式会社

大阪本社 | 〒561-0841 大阪府豊中市名神口1丁目4番30号
TEL.(06)6868-5155(代) FAX.(06)6868-5154(代)

東京本社 | 〒130-0012 東京都墨田区太平2丁目10番10号
TEL.(03)3829-9511(代) FAX.(03)5611-2011(代)

カタログの掲載内容は2024年2月現在のものです。
製品の改良のため仕様・デザインを予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

ご購入に関するお問い合わせ・ご相談・お申し込みは下記へご一報ください。

ユヤマのホームページはこちら!!



世界各国のユーザー様の
活用事例はこちら!!



無償プレゼント実施中!

「開局でお手伝いできること」
「無菌製剤室を作ろう!」



14900003
(株) ヨヤマ



JQA-QMS424
(株) 湯山製作所