

# 専用カセットで錠剤を1/2にハーフカット!

これまでまったく業界に無かった発想で、ユヤマが実現しました。

それは、錠剤を機械(カセット)内で1/2に自動カットし

計数しながら必要数を自動的に払い出す専用マシン。

専用カセットにそのまま錠剤を充填するだけで、

ハーフカットから錠数カウントまで

自動的に行う優れものです。

ぜひ、この便利さを体感なさってください。



錠剤ハーフカッター機能搭載カセットで  
**HALF CUT!**



## 1/2自動カットから計数作業まで、あっという間に対応!



### 半錠カット カウンティングマシン

## YS-CM-HC1

錠剤分包機が他機種・或いは他メーカー製の場合でも、この小さな1台を導入いただくだけで全自動にて錠剤を1/2にカットする単体マシンです。\*ユヤマ半錠専用カセット仕様のみ。



#### カット時微粉の付属清掃ツール



錠剤の形状や組成などによって異なりますが、従来のハサミや各種ツールを用いた際と同様の微粉(かけら)が発生するため、定期的に清掃を行っていただく必要があります。付属のカット時微粉用清掃ツールはマシン本体に接着収納しておくことができます。

#### 仕様

本体寸法	W167 × D297 × H335mm	充填薬品条件	サイズφ5~13mm、厚み1.8~6.0mm ※但し、カプセルは不可
本体重量	4kg(半錠カセット搭載)	最大カウント数	9999錠
電源	AC100V±10% 50/60Hz	カウント方法	カウントアップ/カウントダウン
消費電力	MAX30VA(1台)	ローター1回転あたりの数	11.2秒で、12個~16個のカウント
搭載可能カセット	ユヤマ半錠専用カセット仕様のみ		

※錠剤の割れ方は手動カット時同様、薬品によって異なります。参考資料(写真)をご用意しておりますのでご確認ください。\*錠剤カセット(半錠専用)は別売です。

**HALF CUTTER**

# もう手放せない! 使用するたびにその便利さを実感。

既存の錠剤分包機との組み合わせにも **おすすめ!**



ハーフカット  
専用マシン

## 専用の半錠カット カウンティングマシンなら、 使用条件を全く問いません。

薬剤師の皆様へすぐお役に立てる機能。とはいえ、「錠剤分包機の購入はまだ先」或いは、「他社ユーザーなのだがその便利さを体感したい」そうした声にお応えするために使用条件を問わない単体マシンをご用意しました。

この1台があれば、すぐにでも必要な錠剤数をハーフカットして取り揃えることが可能です。

※デモ機を用意しておりますので、お気軽に当社営業マンまでお申し出ください。

### カウンティング・カットのプロセス



### OPTION

## ユヤマの錠剤分包機なら、ハーフカット機能がオプション搭載可能



全自動  
錠剤分包機

## PROUD、Litrea※にオプション装備すれば、 ハーフカットから分包まで全自動。


薬剤師の皆様の手を煩わせる調剤作業のひとつである半錠カットから分包までを、PROUDとLitreaではすべて手作業ひとつ加えずに全自動で行うことが可能です(最大8カセット搭載)。



※詳細はお問い合わせください。

ハーフカット用の専用カセットは2個単位で、最下段から設けられます。この専用カセットは後付けも可能ですが、錠剤分包機のご購入時に最初からオプションでご注文いただき、錠剤分包機導入当初からこのメリットを得てくださることをお勧めします。

※後付けかどうかにかかわらず有償となります。

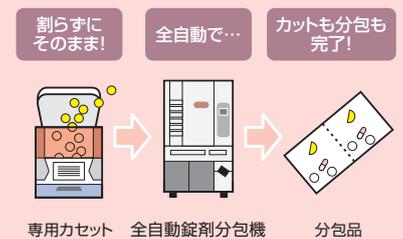

Your Partner in Medication



製造元 **湯山製薬所**  
株式会社

発売元 **ユヤマ**  
株式会社

大阪本社 | 〒561-0841 大阪府豊中市名神口1丁目4番30号  
TEL.(06)6868-5155(代) FAX.(06)6868-5154(代)  
東京本社 | 〒130-0012 東京都墨田区太平2丁目10番10号  
TEL.(03)3829-9511(代) FAX.(03)5611-2011(代)

カタログの掲載内容は2021年2月現在のものです。  
製品の改良のため仕様・デザインを予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

ご購入に関するお問い合わせ・ご相談・お申し込みは下記へご一報ください。

ユヤマのホームページはこちら!!



世界各国のユーザー様の  
活用事例はこちら!!



無償プレゼント実施中!

「開局でお手伝いできること」  
「無菌製剤室を作ろう!」



14900003  
(株)ユヤマ



JQA-QM5424  
(株)湯山製薬所