

効率性・安全性

で選ばれる

Vマスモデルの進化形

自動分割分包機

charty-IV

シャルティ





charty-IV[®]

選ばれてきた“使い勝手の良さ”を さらなる高みへ追求する——NEWシャルティ誕生。

Vマス機構を世に送り出して、半世紀以上が経ちます。その間、シャルティシリーズはロングセラー製品として多くの薬剤師の先生方のそばで調剤業務をサポートしてきました。そんな中でお聞きしてきた先生方の想いを元に、細部にまでこだわり、効率性、安全性を改良して、生まれ変わったcharty-IV。


さらに「使いやすく」・「安心できる」分包機として、調剤業務の新しいスタイルをご提案します。

生まれ変わった使い勝手の良さ


■ 錠剤の手撒きも6色LEDガイド表示で安全に

DTA（手撒き錠剤アダプター）ユニットは、用法もしくは薬品ごとに6色（青・赤・緑・黄・紫・水色）のLEDで色分けされるため、一目で次の錠剤をどのマスに手撒きするかが分かります。視認性が高いため、錠剤を手撒きする場合にも安心です。



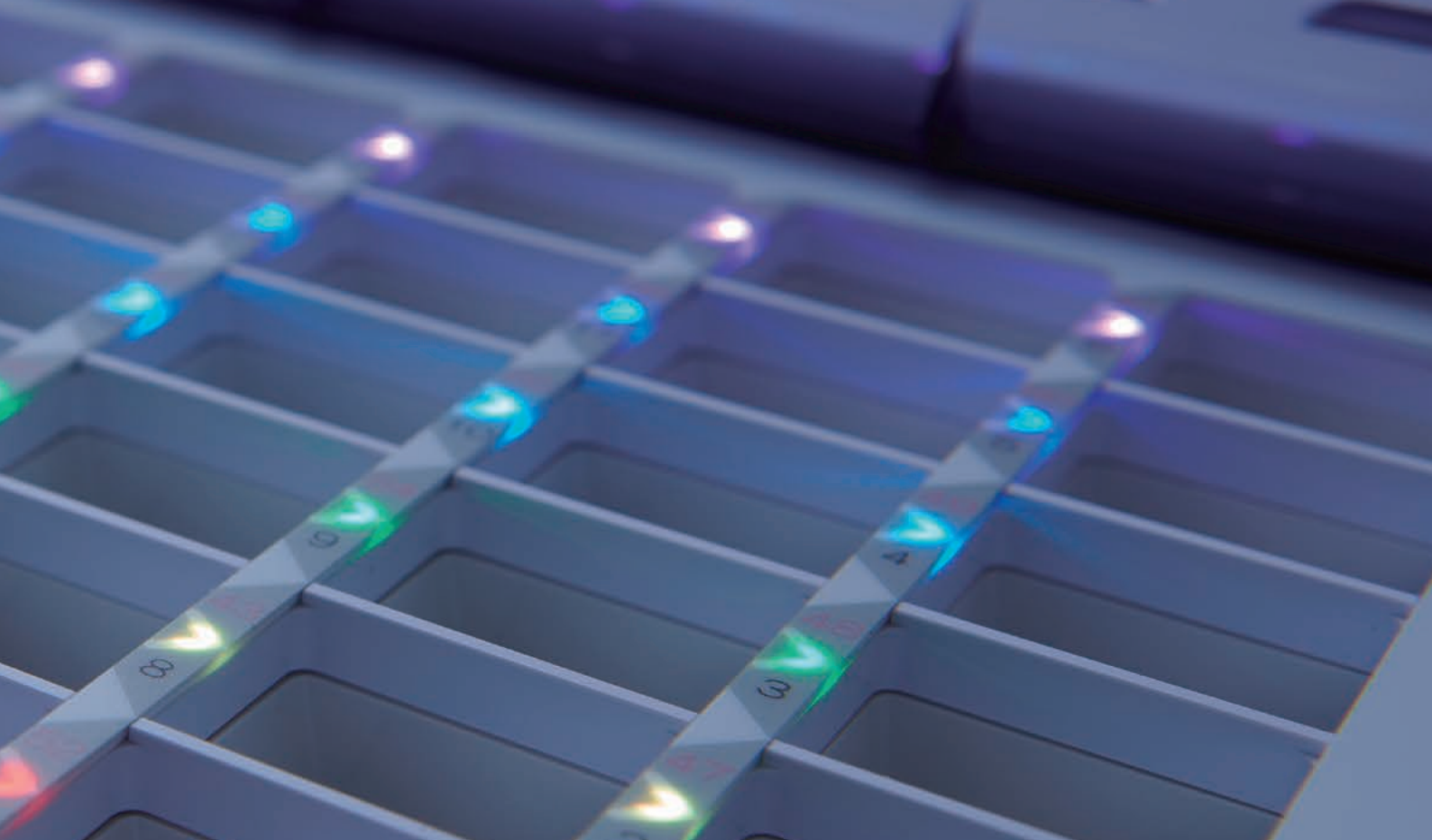

薬品ごとにLEDガイド表示を点灯できるように
点滅、消灯を使った表示方法も追加

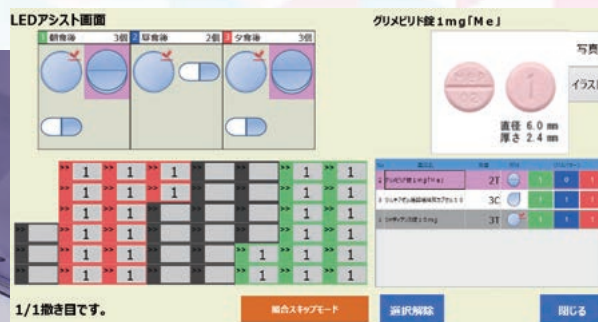

PC画面には錠剤の手撒き位置と錠数を
薬品ごとに表示可能。PAT.

ユーザー様の声にお応えし「薬品ごと」にも表示ができる新機能が追加されました。加えて、既存の点灯方法だけでなく、点滅・消灯を使った表示方法を任意で設定することができるように。半錠や管理薬品を撒く際には「点滅」、撒かないマスには「消灯」を設定することで、薬品をどのマスに置けばいいか瞬時に判断ができるため、撒き間違いを減らし、効率的に作業を行うことができます。

※用法もしくは薬品ごと、どちらのLEDガイド表示を点灯するかはPC画面上で選択できます。

調剤現場に、安心とゆとりを

作業ミスなどを防止する支援機能


VマスカバーとVマスラインで ならし作業も安定

不使用時の異物混入を防止するVマスカバーは、本体固定の開き戸式。カバーの置き場所を考える必要がなく、調剤時にも妨げにならないように本体前面位置までオープンします。また、経験と勘に頼りがちなVマスでの散薬ならし作業も、独自の赤色ラインにより簡単に均等化でき、安定した作業が可能です。



2つ折り分包紙+ヒーターローラー機構で、セットのしやすさと分包精度を両立

「分包紙のセットの行いやすさ」と「大切なお薬をパッケージするシール精度」を両立し、薬剤師の先生方に使いやすさをご提供。さらに、包装機構部はブルラウンド方式で、手前に引き出し楽な姿勢で紙交換ができます。

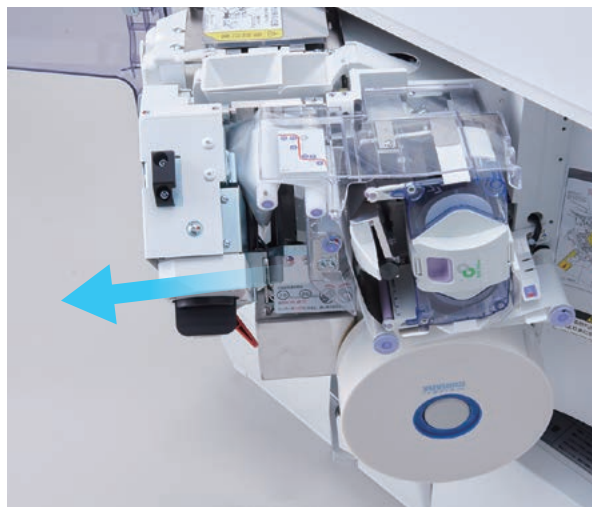


散薬鑑査システムとの連動で入力ミスを防止 OPTION

電子天秤一体型鑑査システムonedy EX2との連動が可能です。onedy EX2で鑑査済みの調剤データは、分包機側に設置するRFID読取装置（オプション）によりRFID秤量皿を読み込ませるだけで、すぐに制御用PC（PX Tab）側で処方展開。分包機の最大包数を予め登録しておけば、自動で処方分割を行う機能も搭載しています。



onedy EX2

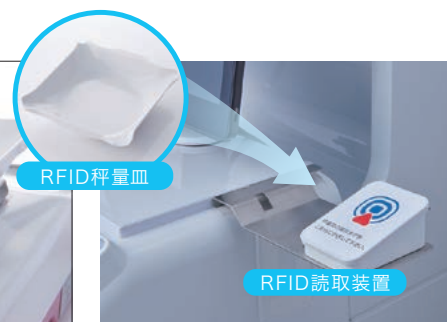

charty-IV


進化した分包操作のユーザビリティ

すみずみまで行き届いた使いやすさ

見やすい角度に

調整できる操作画面 OPTION

作業時の立つ位置によって画面が見にくいといった問題は起こりません。モニターは上下左右に角度を振れるため、ご自身でポジションを調整することができます。

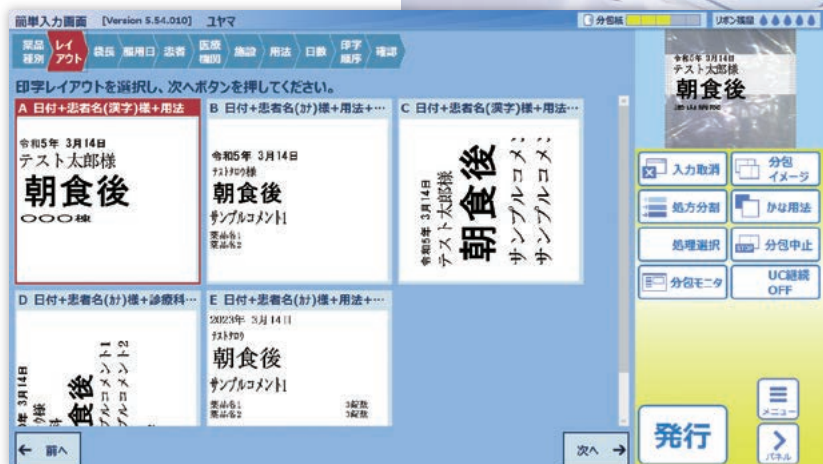

入力しやすい操作画面

制御用PC(PX Tab)は基本的な操作は全て画面タッチで行えます。入力方法は複数あり、使用者に合わせてフレキシブルな使い方が可能。分包機本体の操作のみで分包できる簡易発行機能も搭載しています。

内容量に応じて調整できる分包サイズ

分包サイズは任意に、60・70・76・80・90mm/包の薬包サイズから選択可能。分包する内容量やコスト面を考慮して最適なサイズが選べます。



分包速度は3段階設定

最大分包速度は小型分包機としては十二分な46包/分。散薬の形状などの要素により、分包速度を46・40・30包/分の3段階から設定することができます。作業効率と分包精度の両面から最適値にて分包いただけます。



操作パネルでの分包もカンタンに


散薬/錠剤の分包は分包機本体に備わった操作パネルの操作で簡易発行も可能。散薬と錠剤との同時分包だけでなく、散薬と錠剤を分けた交互分包もボタン1つで設定できます。



※指定条件に限る。薬品の性質やカセット位置等の諸条件により、分包速度は変動いたします。

錠剤カセットは、オーダーからセルフの時代に

セルフ・キャリブレーション・カセット バリアブルカセット (VC) OPTION PAT.

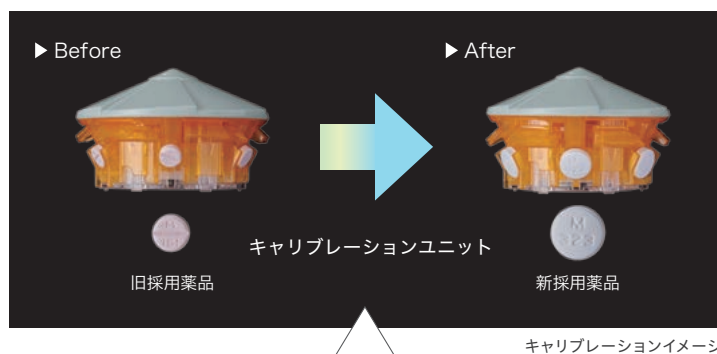

搭載薬品を自在に変えられる 錠剤カセット

後発薬の採用時や、医薬品提供不足による急な採用薬品変更時には同じ錠剤カセットは使えませんでした。その常識を覆す新たな錠剤カセットが誕生しました。分包機の制御用PC (PX Tab) と、キャリブレーションユニット「VCチェンジャー」(オプション)を使用することで搭載薬品が容易に変更できます。新たな注文の手間も時間もいらない、変えたい時に現場で、そしてご自身で変えられる新発想の錠剤カセットです。

選べる! キャリブレーションユニット

手順に従って、長さ、厚み、幅の3つのサイズをキャリブレーションユニットで変更。 ※オプションで選択できます。

手動式

セルフVCチェンジャー


- ▶ 手動でキャリブレーション
- ▶ 軽量で持ち運び簡単!




自動式

VCチェンジャー

- ▶ 自動でキャリブレーション
- ▶ よりスピーディーに変更可能!

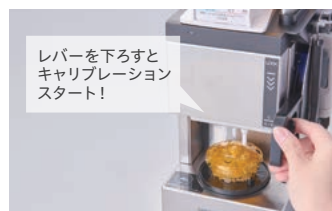

※オプションでどちらかを選択できます。

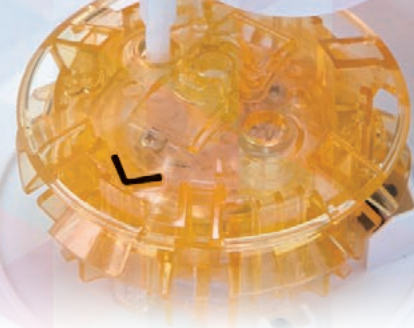

フルカセット運用でも安心


錠剤カセット付き機構の購入を検討する際、後々の採用薬品の変更を考慮し、最初からカセットをフル搭載しないユーザー様も少なくないのではないでしょうか？ VCが搭載されたことによって、いつでも搭載薬品の変更ができますので、後々のために予備を残しておかなくてもよく、導入当初から最大限にその効果を発揮できます。



キャリブレーション画面 PAT.

カセットサイズは2種類

VCはM、SSの2種類をご用意。分包頻度にあわせてサイズを選択できます。ただし、C+カセットはMサイズのみとなります。

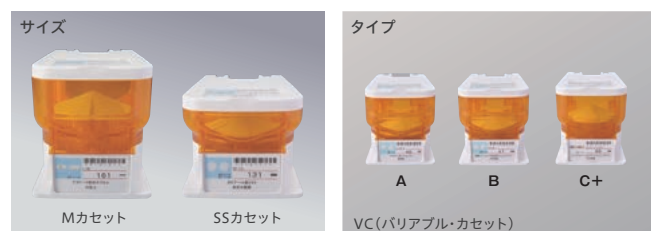


サイズ	M・SS	M・SS	M
タイプ	A	B	C+
対応薬品	平丸(小)	平丸(大)	カプセル
	糖衣形 三角形(膨らみ/平)	四角形(膨らみ/平)	六角形(膨らみ/平)
	小判形(膨らみ)	変形(膨らみ)	小判形(平)
	変形(平)		

※VCは薬品形状により3種類のタイプがあり同タイプの形状の薬品であれば自由に搭載薬品の変更が可能です。

※上記以外の薬品形状には対応していません。対応できない薬品は従来の錠剤カセットでの対応となります。

※使用可能薬品には一部制限があります。詳細は弊社営業担当者までお問い合わせください。

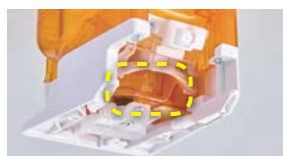

ローターロック機構

ローターが勝手に回転しないローターロック機構を搭載。医薬品が滑り落ちにくくなりました。

カセット推奨機能により常に最適な分包環境へ PAT.

分包機の制御用PC(PX Tab)にて、薬品使用量などのデータから搭載薬品を変更した場合の効果をシミュレーションできます。使用量が少なくなってきた薬品から使用量の多い薬品にカセットを切り替えることで、調剤業務のさらなる効率化に役立ちます。

① シミュレーションで変更するカセットを決定。



※セルフVCチェンジャーの場合。

② セルフVCチェンジャーでキャリブレーションを実施。



③ ラベルを印刷して付け替える。

※プリンターが別途必要となります。



④ 分包機本体でカセットRFIDとラベルを照合。



⑤ 錠剤10錠分の払い出しテストを行う。

※セルフVCチェンジャーのみ。



⑥ 薬品変更完了。

オールマイティな払い出しでより高効率・安全に

ユヤマ独自の可変式ユニバーサルカセット(UC) OPTION PAT.



「手撒きいらず」で手間いらず 「撒き間違いなし」で調剤過誤防止

UNIVERSAL CASSETTE

1つのUCで様々な薬品を分包！
採用薬の増加にも
フレキシブルに対応できます。

薬品ごとにUCにまとめて
入れるだけで分包完了！
手撒き間違いを防止し、
安全性を高めます。



■ 薬品形状にあわせて可変する錠剤カセット

払い出す薬品ごとに、払い出し口の
形状が変化。可変式のUCが様々な
薬品の払い出しを可能にします。



ユニバーサルカセット (UC)

(あらゆる形状の錠剤に対応します。)

カプセル形	軟カプセル形	裸形(膨らみ)	裸形(平)	小判形(膨らみ)	変形(膨らみ)	小判形(平)	長方形(膨らみ)

※掲載は一部です。※使用可能薬品には一部制限があります。詳しくはお問い合わせください。



■ ロック機構+画面表示で誤投入を防止

UCは標準でロック機構がついており、GS1データ
バーで薬品照合を行って初めてロックが外れます。
正面の液晶画面には患者名・薬品名・錠数が表示
され、異なる薬品の誤投入を防ぎます。



■ シンプル・スピーディーな使用方法

使用方法はいたってシンプル。処方発行すると、UC前面の画面上へ患者名・薬品名・錠数が表示されるので、薬品毎にGS1データバーで照合を行い、カセットの中へ必要数をまとめて投入。

「朝が●錠、昼がなしで、夕が●錠…」と考えながら撒かなくてよいので、分包作業のスピードアップが図れます。



■ 使用後は目視チェックで残薬を確実に回収

カセットの使用後は、必ずロック解除スイッチを押してカセットを取り出し、目視で残薬が無いかを確認後、元に戻して初めて情報がリセットされます。なお、5錠までは自動回収で分包される機能も搭載し、安全性を高めています。



■ お手入れも楽に行えます

UCの上部を取り外して、薬品が触れる部分を分解できるようになっているため、お手入れも楽に。すみずみまできれいに清掃できます。



■ 薬品固定での使用も可能(固定UC)

特定の薬品の分包頻度が高い時に、薬品を指定して、固定UCとしても設定可能。状況にあわせてフレキシブルに使用できます。

※UCには乾燥剤を入れられませんので、吸湿性の高い薬品を長期間滞留させることはおすすめしません。



半錠分包の新スタンダード。安全性と効率性を追求した半錠対応力セット。

半錠対応UC(ユニバーサルカセット)第二世代 OPTION PAT.

■ 手撒き分包が多い半錠の、手撒き間違いを防いで安心・安全に。



● 整数錠と
● 半錠、
どちらも投入OK!

※ただし1つのUC内に整数錠と半錠の混在は不可です。



■ 既存の半錠対応UCと比べて、対応薬品数がアップ!

今までの対応薬品剤型(第一世代)

裸形(膨らみ)	裸形(平)



新たな対応薬品剤型(第二世代)

糖衣形	小判形(糖衣)	変形(糖衣)	長方形(糖衣)	小判形(膨らみ)
小判形(平)	長方形(膨らみ)	長方形(平)	変形(膨らみ)	変形(平)
三角形	四角形	多角形		

※整数錠・半錠の両方の分包に対応していますが、一部投入できない薬品があります。

※詰まり防止の逆転動作等により、半錠の分包は整数錠に比べると払い出し速度が遅くなる傾向があります。また、薬品の形状により、整数錠の分包でも通常のUC使用と比較して払い出し速度が遅くなる場合があります。

■ さらに多くの錠剤力セットが搭載できるように。

錠剤力セットのモーターベース機構を新たに見直したことで、従来機と比較し、より多くの力セットを搭載できるように。分包が多い薬品を力セットに搭載することで、効率化を図ることができます。また、新たに登場したSSS力セットには大量に分包しない薬品を都度必要数のみ充填するなど、運用に応じてサイズの異なる力セットを使い分けできます。

※それぞれの搭載力セット数についてはP14に掲載している仕様をご確認ください。



錠剤一包化の増加にも心強い選択肢

後付可能な5種類16タイプの錠剤カセット機構 OPTION PAT.

■ 錠剤カセット機構は下記の16タイプより選択できます

(UC…ユニバーサルカセット、VC…バリアブルカセット、TC…RFID錠剤カセット)

UC5+VC54	UC5+TC54	UC5+VC45	UC5+TC45	VC61	TC61	UC5+フリー棚	UC10+フリー棚
UC5+VC54 シャッター付	UC5+TC54 シャッター付	UC5+VC45 シャッター付	UC5+TC45 シャッター付	VC61 シャッター付	TC61 シャッター付	UC5 (棚なし)	UC10 (棚なし)



SSSカセット採用で、54個のカセットを搭載。大量に分包しない薬品もSSSカセットに割り当て、カセットで払い出せる薬品数を最大限にすることができます。



45個のカセットのうち、Mカセットが36個を占めるタイプ。分包頻度の高い薬品を容量の大きいMカセットに搭載して充填回数を削減できます。



61個のカセットを搭載することが可能。薬品の種類がある程度決まっており、1つでも多くの薬品を錠剤カセットに搭載しておきたい場合に有効です。



分包頻度の高い薬品を中心に、UCを使用して分包業務を効率化。また、分包機上部のスペースを薬品棚としてご使用いただけます。




取り扱い薬品種が多くても、手撒きいらずに次々に薬品投入できるUC10個タイプ。カセットを決めきれない面対応薬局様に最適です。

※SSSカセットはどのタイプでもTCとなります。

■ RFID錠剤カセットはセット位置フリーで充填も確実に

錠剤カセットはセット位置フリーで、カセットをどの位置に戻しても分包機側でどの薬品かを認識します。戻し間違いによる誤払い出しが発生しないので、急ぎの時も安心して使用できます。また、薬品補充時にはカセットを定位置に置いてRFIDを認識させ、薬品のGS1データバーを照合することで、充填ミスを防ぎます。

欠品時などの音声によるカセット番号告知機能搭載

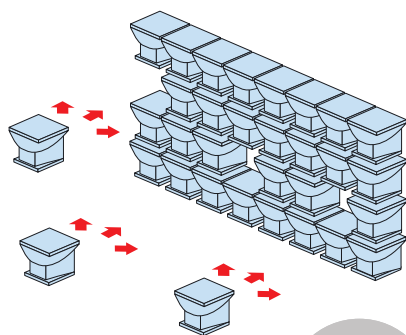

全フリーゾーン

一度に複数の錠剤を補充する場合に便利。



RFIDチップ



■ シャッターで万全なセキュリティ

(UC5+54錠剤カセット、UC5+45錠剤カセット、61錠剤カセットで選択可能)

リスクマネジメントの観点から、錠剤カセット機構に手動シャッター付タイプのものをご用意。業務終了時はシャッターを閉めておけば、カセット内薬品を勝手に持ち出される心配がありません。また、手動タイプのため、停電時でも開閉が可能です。



61錠剤カセット

■ 汚れ検知機能で事前にケア



カセット使用による汚れを検知し、清掃を促すワーニングを表示。汚れによるセンサー異常のリスクを、未然に防ぎます。普段見えない部分もお手入れいただける安全機能です。

毎日使うものだからこそ、手入れしやすく

細かいところまで清潔に保てるメンテナンス性

清掃しやすい内部構造

散薬分割器専用の集塵装置。コンタミを防ぐには常に清潔を保つ工夫が必要です。

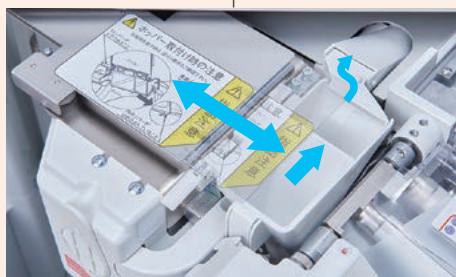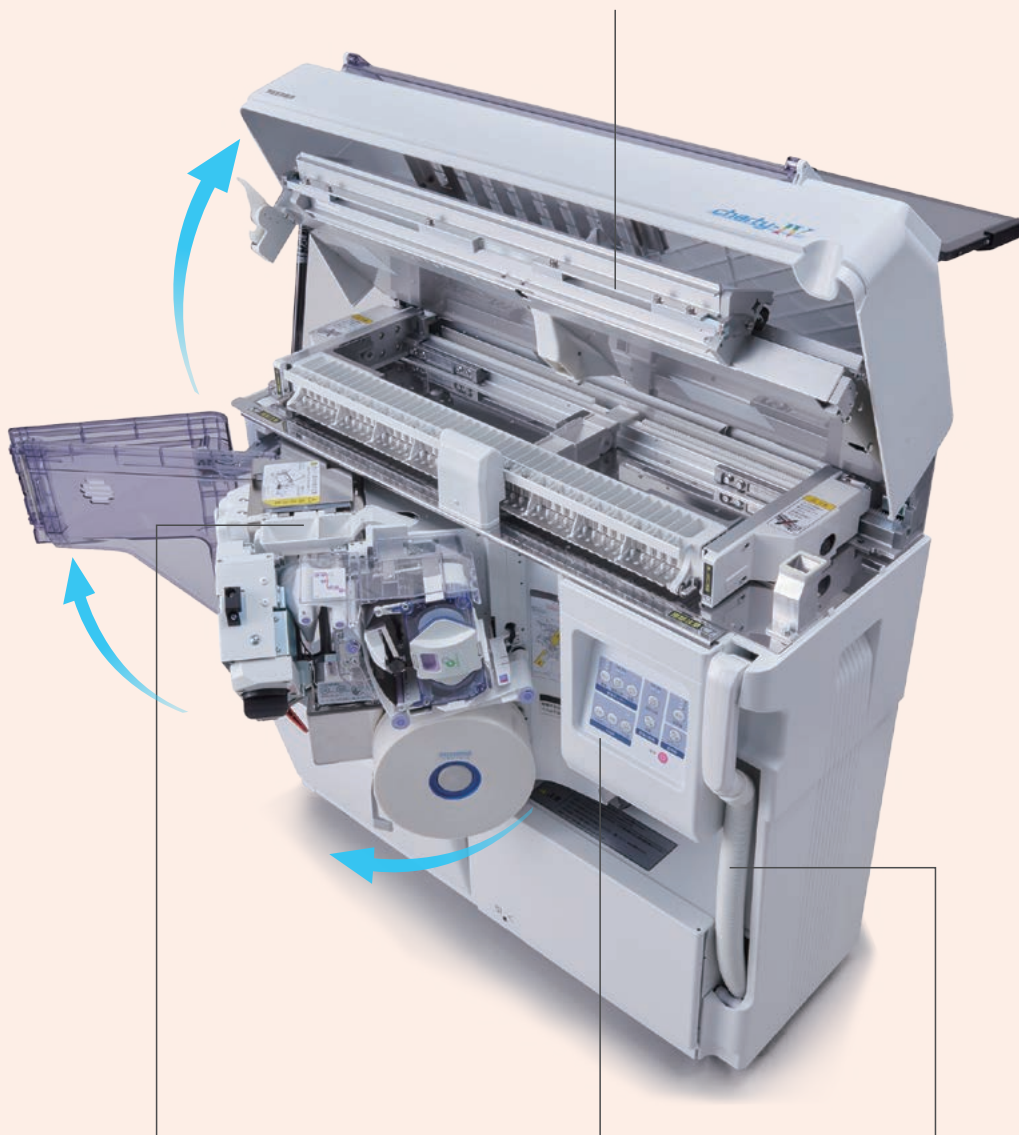

分包後に開口部を閉じて一気に吸引する機構により、残薬対策は万全です。

最終ホッパー集塵量調整や散薬分割器の移動もボタン操作のみで簡単です。

ハンディクリーナーはノズルが2種類。吸引力は強・中・弱の3段階切替で、徹底的に清掃できます。

■ 日常使用でのメンテナンスしやすさも重要なポイントのひとつ

散薬経路となる箇所は簡単に取り外せて、水洗いもOK

最終ホッパー



散薬分割器



Vマス部仕切板



錠剤の経路も簡単に取り外せるので、すみずみまで拭き取り可能



錠剤分割機器



錠剤ホッパー



■ 先駆者として培ってきた進化系テクノロジー

バイブレーション方式で静かにコンタミ防止

最終ホッパーは振動モーターでのバイブレーションで優れた残薬抑止に加え静粛性能も高く、快適な調剤環境を実現します。



エコモード搭載で省エネにも配慮

業界に先駆けてECOモードを搭載しており、省エネ・エコへ配慮した、非稼働の待機電力を最大で約20%以上抑制します。



服薬される患者様の安心のために

服薬ミスを防ぐ視認性向上ツール

■ 環境にやさしいリフィルリボン

使用できる印字リボンはモノクロ(黒)、ハーフ(黒)、4色(カラー)の3種類。ニーズに合わせて選択できるのはもちろん、詰め替え式のリボンを使用することで、環境にやさしく、ランニングコストも下げることが可能になりました。



専用カセット 左:フルサイズ用 右:ハーフ用



4色カラー印字 ※受注生産




モノクロリボン(黒)印字 ハーフリボン(黒)印字



ピクトグラム印字

■ 手軽に色分けできる自動4色ペンライナー OPTION

時代の要請に応じて、在宅医療に取り組む薬局様・病院様が増える中、薬包を識別するための色分け作業も増えています。費用面から、マーカーを用いて分包後にラインを手作業で引いているケースも少なくありません。そのような薬局様・病院様の色分け作業を簡単にするため、分包と同時に自動でライン引きを行うユニットを開発。用法ごと、施設ごとに色設定を行うことができ、先生方の作業負担を軽減します。

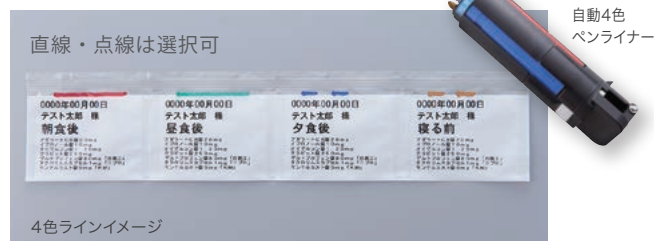

直線・点線は選択可

4色ラインイメージ

切りやすく、破れにくいユヤマ分包紙

■ クリーニングリーダー付分包紙 PAT.

ユヤマ独自の次世代分包紙「クリーニングリーダー付分包紙」は交換時に先端部分がヒーターローラーをクリーニング! 分包機を長く使用いただくためのご提案です。



■ スパットカット® (意匠登録)

高カット性分包紙「スパットカット」は薬包上部の圧着面のどこからでも簡単にカットできます。ただし、投薬時に輪ゴムで縛った際には切れにくいといった、絶妙な処理が施されています。



■ 横からもカット可能なノッチ

分包された薬包には、横方向にも簡単にカットしやすいノッチ(切れ目)が1包毎に自動で入ります。



仕様

UC…ユニバーサルカセット VC…バリアブルカセット TC…RFID錠剤カセット

製品名	自動分割分包機 Charty-IV(シャルティ-IV)					
型式	CPX45AIV	CPX45AIV-UC5VC45(S)-S または CPX45AIV-UC5TC45(S)-S	CPX54AIV-UC5VC54(S)-S または CPX54AIV-UC5TC54(S)-S	CPX45AIV-VC61(S)-S または CPX45AIV-TC61(S)-S	CPX45AIV-UC5 または CPX45AIV-UC5N (棚なし)	CPX45AIV-UC10 または CPX45AIV-UC10N (棚なし)
製品画像						
外形寸法	幅890×奥行404×高さ930mm	幅890×奥行633×高さ1,996mm(シャッター付) 幅890×奥行633×高さ1,896mm(シャッター無)			幅890×奥行633×高さ1,896mm 幅890×奥行633×高さ1,376mm(棚なし)	幅890×奥行633×高さ1,896mm 幅890×奥行633×高さ1,533mm(棚なし)
質量	約101kg	約220kg (シャッター付) 約210kg (シャッター無)			約180kg 約170kg (棚なし)	約200kg 約190kg (棚なし)
消費電力	900VA (MAX)	1,200VA (MAX)				
電源	AC100V±10V(50/60Hz)					
搭載カセット数	—	M 36個、SS 9個	M 18個、SS 18個、SSS 18個	M 34個、SS 27個	—	—
分包モード	散薬、錠剤、錠剤・散薬混合、錠剤・散薬交互					
分包数	散薬：1～45包 錠剤：1～360包(PX 発行時) ※錠剤カセットのみのときは792包まで可能。					
分包速度	46、40、30包/分(3段階切替)					
1包寸法	横(90、80、76、70、60mmの5段階)×縦70mm					
包装材料	セロファンポリ、グラシンポリ(2つ折り分包紙) ※但し、透明グラシンは使用できません。					
分包紙交換の標準装備	ブラウンド・ヒーターローラー方式					
手撒き錠剤マス数	45マス					
ロス袋	0～4包(スイッチにて切替可能)					
集塵機構	強・中・弱 3段階(スイッチにて切替可能)					
標準機構	6色LED手撒きガイド	制御用PC(PX Tab)、6色LED手撒きガイド、バーコードリーダー、RFID読取装置(錠剤カセット用)			制御用PC(PX Tab)、6色LED手撒きガイド、バーコードリーダー	
使用環境	使用温度範囲 10℃～ 35℃ 使用湿度範囲 15% ～ 85%(ただし、結露なきこと) ※温度35℃のときは湿度48% 以下 湿度85% のときは温度28℃以下で使用してください。 ※オプションの自動4色ペンライナーを使用している場合、温度範囲は10℃～ 30℃。					
オプション	制御用PC(PX Tab)、自動4色ペンライナー、バーコードリーダー、RFID読取装置(onedEX2連動用)、RFID読取装置(錠剤カセット用)、自動カッターユニット、タブレット用キーボード、タブレット用タッチペン、地震対策金具、機械カバー	自動4色ペンライナー、RFID読取装置(onedEX2連動用)、自動カッターユニット、タブレット用キーボード、半錠対応UC(第二世代)、VCチェンジャー、セルフVCチェンジャー、タブレット用キーボード、タブレット用タッチペン、地震対策金具、機械カバー、シャッター機構			自動4色ペンライナー、RFID読取装置(onedEX2連動用)、自動カッターユニット、タブレット用キーボード、半錠対応UC(第二世代)、タブレット用タッチペン、地震対策金具、機械カバー、錠剤ケース(ユニエース共通)、追加棚、棚ワイヤー	

その他機能 OPTION

薬品の撒き間違いを防止する

バーコードリーダー(CPX45AIVのみオプション)

手撒きユニットを使って錠剤を手撒きする際に、対象薬品のGS1データバーをバーコードリーダーにかざすことで薬品の照合ができ、薬品違いによる撒き間違いを防ぎます。錠剤カセット機構付きでは標準装備となります。




錠剤手撒きを作業台でも行える「タブレットライザー」

錠剤手撒きに、取り外し可能なオプションをご用意。手撒きの作業を作業台で行い、セッティングしたものを錠剤手撒き部(DTA)に装着することが可能です。分包機上の限られたスペースではなく、作業台の上で、安心して作業いただけます。カバーを装着すれば薬品セット後の異物混入や薬品が移動するといったこともありません。



作業台で薬品セット

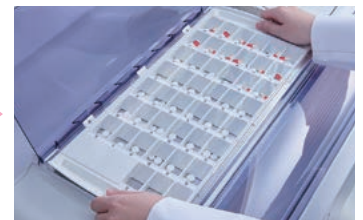

分包機に装着

制御用PC(PX Tab)

製品名	PX Tab（マルチ印字機能タイプ）		
入力画面			
	処方入力画面	印字レイアウト選択画面	カセット選択画面（錠剤カセット機構付のみ）
印字方式	サーマルマルチ		
通信	可		
対応印字リボン	リフィルリボン モノクロ(黒)、ハーフ(黒)、4色(カラー)		
印字項目	患者コード、患者氏名、処方箋番号、診療科名、病棟名、用法、メッセージ、日付（正和暦）、引換券番号、薬品名、固定文字列、ピクトグラムグラフィックなど各種、バーコード、図形、検査印字		
印字モード	連続・反復		
印字仕様	フリーサイズ・フリーフォント、印字レイアウトフリー、縦横印字可		
印字予約	制限なし		
Do登録数	最大10万件（但し、設定した期限を超過すると処方データは自動消去。（最大730日までの期限設定可能））		
AV動画マニュアル	あり		

※スパットカット、クリーニングリーダーは湯山製作所の登録商標です。

OPTION（ただし、錠剤カセット機構付には標準装備）

PX Tab



OPTION

お好みでキーボードやタッチペンをオプションとして付けることもできます。



タブレット用キーボード タブレット用タッチペン



**YUYAMAのSDGsへの取り組み
これまで、これからも。**

私たちYUYAMAは、SDGs達成に向け、持続可能な社会実現を目指し、これからも活動を続けていきます。

SDGs…持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）。2015年9月の国連サミットにおいて採択された、2030年までに地球規模で解決すべき国際目標。17のゴール・169のターゲットから構成されています。



分包紙は別売となっております。弊社製純正分包紙をご使用ください。

なお、分包紙は紙のみが販売対象物であり、それを巻いている芯（樹脂製芯管）は、所有権を留保しており、分包紙を使い切る間、一時的に貸与させていただいております。ご利用後は、弊社または分包紙販売店の社員が回収にお伺いいたしますので、ユーザー様で保管し、第三者に対して売却、譲渡、貸与すること等を固くお断りいたします。

Your Partner in Medication



製造元 株式会社 **湯山 製作所** 発売元 株式会社 **ユヤマ**

※「Your Partner in Medication」は株式会社湯山製作所の登録商標です。

カタログの掲載内容は2026年7月現在のものです。
製品の改良のため仕様・デザインを予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

ご購入に関するお問い合わせ・ご相談・お申し込みは下記へご一報ください。



**NISIPS®とは、日本薬剤師会が提案する薬局向け
コンピュータシステム間の連携システムです。**
（商標登録 第5214610号）

大阪本社

東京本社

〒561-0841 大阪府豊中市名神口1丁目4番30号
TEL.(06)6868-5155(代) FAX.(06)6868-5154(代)

〒130-0012 東京都墨田区太平2丁目10番10号
TEL.(03)3829-9511(代) FAX.(03)5611-2011(代)

ユヤマのホームページはこちら!!



世界各国のユーザー様の
活用事例はこちら!!



無償プレゼント実施中!
「開局でお手伝いできること」
「無菌製剤室を作ろう!」



14900003
(株)ユヤマ



JQA-QM5424
(株)湯山製作所