

多錠半錠カッター



Your Partner in Medication

yuyama

ハフディカッター



複数の錠剤 を1回で
カット可能

誰でも 高精度カット

どこでも 使える小型サイズ

お手入れも簡単



1回で大量に半錠カット!
カンタン、安全な
手動カッター

PAT.P

MANY

複数の錠剤を1回でカット可能

錠剤を複数並べて、一気にカット！

ガイドバーで挟んで、カンタンセット。

錠剤ひとつひとつをカットする手作業に比べて、大幅な時間短縮ができます。



ACCURATE

誰でも高精度カット

カット左右比率（重量比）は50±10%！

上下2枚のカッター刃が高精度カットを実現。個人の技量が必要な半錠カットを、誰でも正確に行っていただけます。PAT.P



ガイドバー内部にはばねが入っており、カット時に少し外側に開くため、錠剤が割れにくくなっています。PAT.P

ACCESSORY

付属の割線整列棒・割線整列プレートを用いて、割線を揃えてカットしていただくことも可能です。




COMPACT

どこでも使える小型サイズ

置き場所を選ばないコンパクトサイズ。

持ち運びもカンタンです。

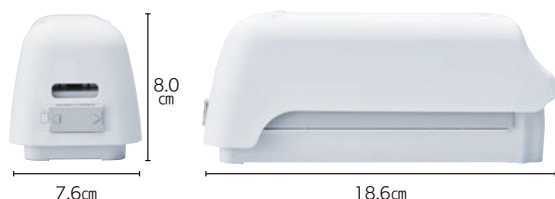

CLEAN

お手入れも簡単

本体を裏返して底面の爪を押すと、カッターテーブルが外れます。

内側及びカッター刃をブラシで清掃可能！コンタミを防止します。



※使用時は、上部カバーを開けても刃に手が触れない機構となっているため、安心してお使いいただけます。PAT.P

仕様

製品名	多錠半錠カッター ハンディカッター	対象錠剤形状	【丸型】 直径φ5.0～16.0mm 厚み 2.0～ 6.5mm
型式	YS-HC-01		【楕円型】 幅 3.0～13.0mm 厚み 2.0～ 6.5mm 長さ 5.0～24.0mm
本体寸法	(W)76×(D)186×(H)80mm	不可錠剤	糖衣錠、カプセル、軟カプセル、 「ピオグリタゾン」「アクトス」「ペプリコール」系 (カッター刃が錆びる為、使用しないでください。)
本体質量	610g	苦手錠剤	膨らみの大きい錠剤、硬い錠剤、脆い錠剤、 フィルムコーティング錠、割線の深い錠剤 (割線整列プレートを使用しない場合)
カット精度	カット左右比率（重量比）50±10%		
カット有効長	103mm（直径φ10mmの場合10錠）		
付属品	割線整列プレート、割線整列棒、トレイ、掃除用ブラシ		
消耗品	上カッター刃、下カッター刃、掃除用ブラシ		

※詳細は弊社営業担当者までお問い合わせください。

注意事項

- ・マグミット錠330mgなどの硬い錠剤は、複数錠で切ると中心からズレて切れることがあります。その場合は、切る錠数を減らしてカットしてください。
- ・錠剤の材料・形状によっては割れやすい・崩れやすいものがあるため、最初は1錠でテストしていただくようお願いいたします。



製造元
株式会社

湯山製薬所

発売元
株式会社

ユヤマ

大阪本社 | 〒561-0841 大阪府豊中市名神口1丁目4番30号
TEL.(06)6868-5155(代) FAX.(06)6868-5154(代)
東京本社 | 〒130-0012 東京都墨田区太平2丁目10番10号
TEL.(03)3829-9511(代) FAX.(03)5611-2011(代)

ユヤマ HP



カタログの掲載内容は2025年2月現在のものです。

製品の改良のため仕様・デザインを予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

ご購入に関するお問い合わせ・ご相談・お申し込みは下記へご一報ください。

実際のカット動作や使用方法に
関する動画はこちら！



無償プレゼント実施中！

「開局でお手伝いできること」
「無菌製剤室を作ろう！」



(株)湯山製薬所