

Your Partner in Medication

yuyama



個別照合で、最終鑑査に安心を。

最終鑑査支援装置
Monodi
モノディ

シンプルな機能性と、 高い精度で応えるMonodi。

最終鑑査支援装置「Monodi(モノディ)」は、
患者様にお渡しする薬品の種類や数量を
個別照合と重量鑑査で正確に確認する、
調剤業務に欠かすことのできないシステムです。




鑑査の手順

■ 操作者のID(バーコード)でログインを行います。 ■ 処方一覧から鑑査を行う処方

✓ 個別照合

個別照合でどなたでも正確に薬品鑑査

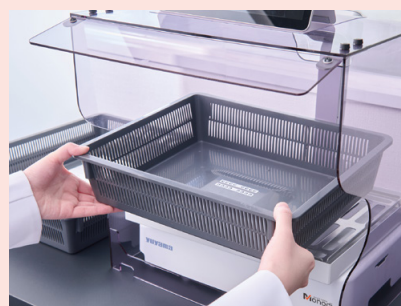

① 空のトレイをセットします。

※事前に付属のARマーカースीलをトレイ
底面に貼付しておきます。



② 薬品ごとにバーコードリーダー
でGS1データバーを読み取り、
トレイに入れます。

✓ 重量鑑査

重量計測で数量まで確實



③ 薬品をトレイに入れると、薬品
ごとに重量を計測します。

重量鑑査は



閾値モード

重量の上下限の
内に収まっている
モード。g値

■ 本体構成



※オプションで半固定タイプ
もお選びいただけます。

- A タブレットPC ■ B バーコードリーダー ■ C カメラ ■ D 天秤
- E ジャーナルプリンタ(オプション) ■ F 推奨トレイ(オプション)
- G 風防(オプション) ■ H トレイ台(オプション)



※画像はオプションを含みます。

大容量で効率よく鑑査

天秤の測定可能重量は最大4200g
(トレイ、トレイ台含む)。薬品数が多くても、一度に鑑査を完結させることができます。また、Monodiには専用のトレイはありません。現場でお使いのトレイをそのまま使用いただけます(※)。

※サイズ制限あり

を選択し、展開します。

にチェック

閾値モードと換算モードの切り替えが可能。



換算モード

範囲を設定し、その範囲
いるかを視覚的に確認
での判定になります。

重量値を薬品単位に置き換えて表示
させるモード。

✓ 撮影・記録

鮮明な画像撮影と記録紙の出力



- 4 カメラで鮮明な画像を自動撮影します。
※画像の保存期間は標準で約3か月です。

- 5 鑑査完了時にジャーナルプリンタ(オプション)から記録紙が出力されます。



ジャーナルプリンタ

最終鑑査記録紙		
オーダー番号:	25031600029130	
引換券番号:	2	
患者ID:	2792	
患者氏名:	テスト 太郎	
診療科:	心療内科	
鑑査者:	テスト 管理薬剤師	
RP 名称	目標総量	鑑査総量
01 ツムラ大建中漢エキス顆粒(医療用)	90包	90包
	分1 朝食後 (分1) 90日	
02 ビタバステチンカルシウム錠 4mg「Z E」	120錠	120錠
	分1 夕食前 (分1) 120日	
04 マグミット錠 3.0mg	120錠	120錠
	分1 夕食前 (分1) 120日	
鑑査終了: 2025/04/30 11:48:40		



■ 本体仕様

製品名	最終鑑査支援装置Monodi
型式	YS-CCS-M-01
外形寸法	標準：W380mm×D295mm×H390mm 風防あり：W405mm×D445mm×H410mm タブレットPC：タッチスクリーン10.5インチ Pixelsense™ディスプレイ
質量	標準：約8.5kg 風防・トレイ台あり：約9.5kg
消費電力	本体：150VA、ジャーナルプリンタ（オプション）：65VA
電源	AC100V 50/60Hz
測定可能重量	0.5g～4200g（トレイ、トレイ台含む）
測定精度	0.2g/錠以上（振動や気流がない環境） ※1シート薬品を推奨トレイで測定した時のものとする。
測定時間	約2.5秒（振動や気流がない環境） ※1シート薬品をトレイに置いてから確定までの測定時間とする。
オプション	バーコードリーダー（半固定タイプ）、ジャーナルプリンタ、 推奨トレイ、風防（※1）、トレイ台（※2）、VPNルーター

※1：空調等の影響により天秤が安定しないときには、風防が必要になります。

※2：A4トレイや推奨トレイを使用するときには、周囲の物と干渉しやすくなるため、トレイ台が必要になります。
また、下からの気流の影響を受けやすくなるため、風防も必要になります。

取引・証明以外用



YUYAMAのSDGsへの取り組み
これまで、これからも。

私たちYUYAMAは、SDGs達成に向け、
持続可能な社会実現を目指し、これからも
活動を続けていきます。

SDGs…持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）。2015年9月の国連サミットにおいて採択された、2030年までに地球規模で解決すべき国際目標。17のゴール・169のターゲットから構成されています。

Your Partner in Medication



製造元
株式会社

湯山製薬所

発売元
株式会社

ユヤマ

※Your Partner in Medicationは株式会社湯山製薬所の登録商標です。

大阪本社 | 〒561-0841 大阪府豊中市名神口1丁目4番30号
TEL.(06)6868-5155(代) FAX.(06)6868-5154(代)

東京本社 | 〒130-0012 東京都墨田区太平2丁目10番10号
TEL.(03)3829-9511(代) FAX.(03)5611-2011(代)

カタログの掲載内容は2025年4月現在のものです。

製品の改良のため、仕様・デザインを予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

ご購入に関するお問い合わせ・ご相談・お申し込みは下記へご一報ください。

ユヤマの
ホームページは
こちら



<https://www.yuyama.co.jp>



全国最大級の
クリニック開業物件
検索サイト



<https://www.ysjournal.net>



(株)湯山製薬所
250410C