

「**刻印判別機能**」搭載

鑑査支援機能付き小型全自動錠剤分包機

Litrea



Wカメラと先進のカセット機構を融合。 コンパクトなオールインワン分包機。








カメラ内蔵の全自動錠剤分包機が小サイズでデビュー。





FEATURES

内蔵した高性能カメラで、分包前の錠剤を上下から撮影。

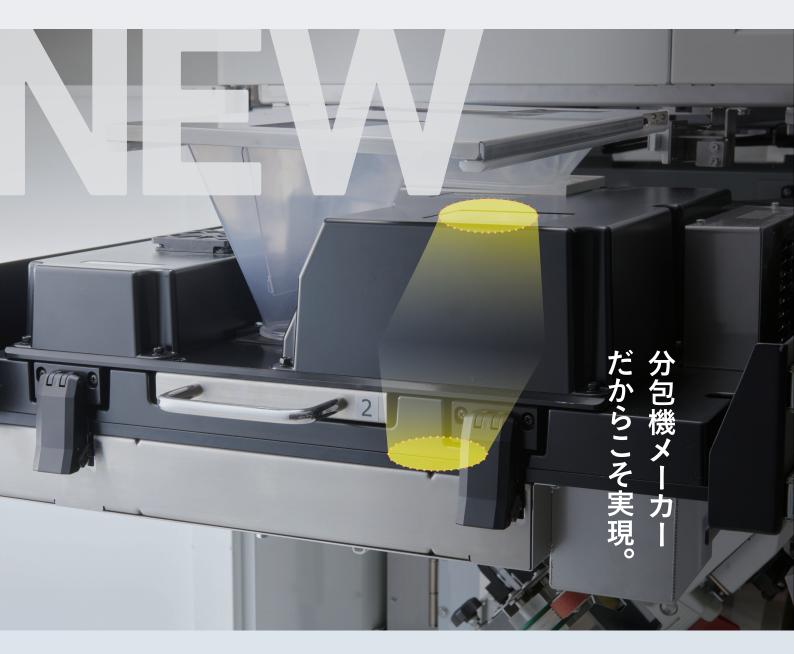

新設計の錠剤分包機。錠剤の判別がしやすい




分包完了と同時に、すぐさま画像鑑査が可能。

錠剤カセット(VC)、ユニバーサルカセット(UC)、手撒き(DTA)といった全ての払い出し錠剤を内蔵カメラで撮影するため分包後すぐに画像鑑査が可能となります。



鮮明な薬品画像を直接撮影。

錠剤分包機に鑑査支援機能を搭載したことで、分包前の 薬品そのものを撮影可能。白帯・白ベタといった分包紙の 種類、印字なども気にする必要はありません。

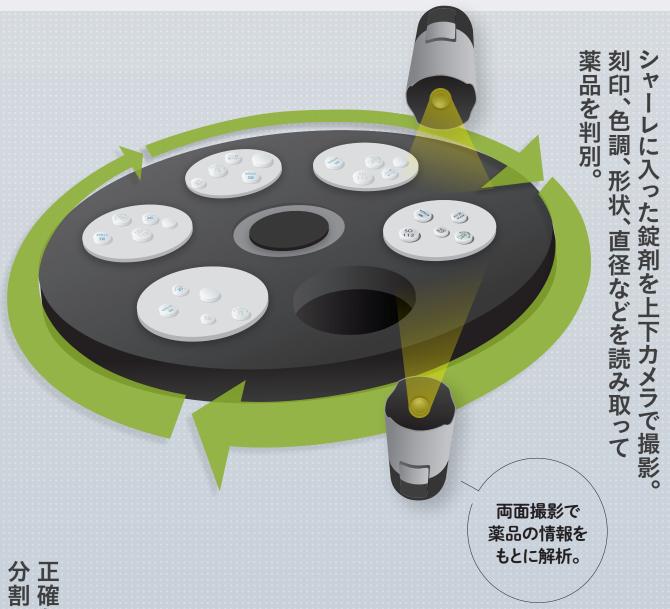



より正確な撮影。

分割リング(シャーレ)には揺動(シェイク)機能を搭載。錠剤が 立ったり、重なったりしない工夫が施されています。




刻印のない錠剤、半錠、1/4錠、 カプセル、透明薬品(一部)も判定可能。

色調、形状、直径といった薬品の情報から判別します。

FEATURES

充実機能で見やすい鑑査支援ソフト搭載。

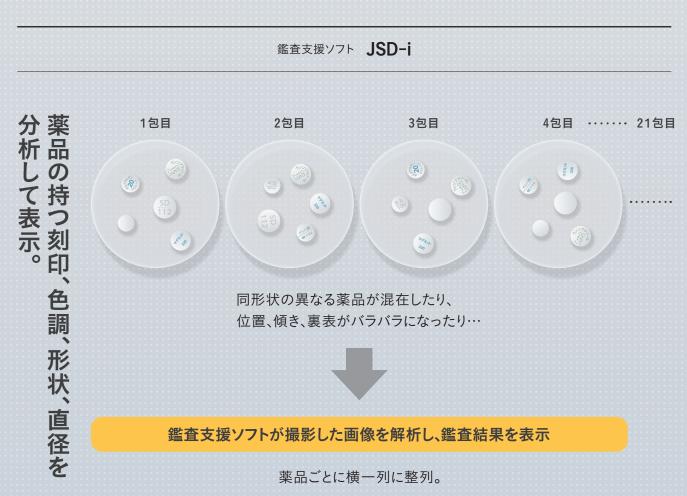





薬品間違いも色分けして表示。どこが間違っているか、一目で確認できます。 高い精度で間違いを判別可能なため、安心して鑑査を行っていただけます。




刻印情報をAIが読み取る。表面、裏面の刻印情報を読み取り、 薬品の種類を自動判別します。

強調表示も一





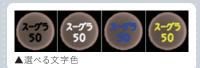

色の濃い薬品や、薄い刻印で文字が見えにくい場合でも、画面 上で強調表示が可能です。薬品の色に合わせて、文字色も黒・ 白・青・黄色から選択できます。

横並び表示。



薬品一覧切替ボタンをタッチすると、正画像を表示。照らし合わせながら 確認し、承認などの判断を行っていただけます。

①表面、裏面が異なる識別コードを持つ薬品

②NG/不明薬品と判定された薬品

③カプセル

上記3種は撮影画像を上下表示させます。

マトロキング



チェックが必要な分包紙にマーキング。 長期処方時も効率的な一包化鑑査が可 能です。

鑑査画像の保存期間は 100日以上。

患者様からの問い合わせがあった場合、 いつでも、見たい時に確認できます。

錠剤カセットは、オーダーからセルフの時代に。


ユヤマ独自のセルフ・キャリブレーション・カセット バリアブルカセット(VC) PAT

搭載薬品をその場で 自在に変えられる錠剤カセット



$\vee \wedge R I \wedge B L$ バリアブル・カセット

後発薬の採用時や、医薬品供給不足に よる急な採用薬品変更時には同じ錠剤 カセットは使えませんでしたが、その常識 を覆す新たな錠剤カセットが誕生しまし た。錠剤分包機の制御端末(JSD.NET) と、キャリブレーションユニット「VCチェン ジャー」を使用することで搭載薬品が容易 に変更できます(動作時間約2~3分)。新 たな注文の手間も時間もかからない、変え たい時に現場で、そしてご自身で変えられ る新発想の錠剤カセットです。

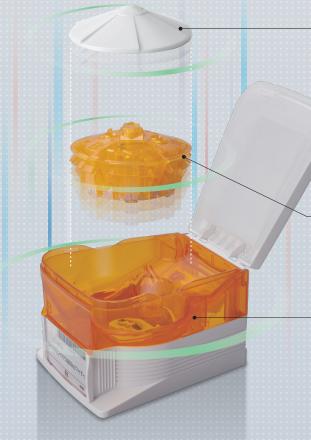

[キャリブレーションイメージ]

BEFORE



〈旧採用薬品〉



キャリブレーションユニット



〈新採用薬品〉





ローターヘッド

ローターのキャリブレーション (形状調整)を行う際に取り外します。

ローター

薬品経路となる部品。 カセット内で回転して薬品を 1錠ずつ落とします。

バリアブルカセット本体

従来の錠剤カセットと異なり、 ローターの取り外し、 キャリブレーションが可能になりました。



ローターが勝手に回転し ないローターロック機構を 搭載。薬品が滑り落ちにく くなりました。



キャリブレーション画面 PAT

サイズ

その効果を発揮できます。

錠剤分包機の購入を検討する際、後々の採用薬

品の変更を考慮し、最初からカセットをフル搭載

しないユーザー様も少なくないのではないでしょ

うか? VCが搭載されたことによって、いつでも搭 載薬品の変更ができるので、後々のために予備を 残しておかなくてもよく、導入当初から最大限に

力

VCはM、SSの2種類をご用意。分包頻度にあわせてサイズをお選びいただけます。 但し、C+タイプはMサイズのみとなります。



※VCは薬品形状により3種類のタイプがあり同タイプの形状の薬品であれば自由に搭載薬品の変更が可能です。
※上記以外の薬品形状には対応しておりません。対応できない薬品は従来の錠剤カセットでの対応となります。
※使用可能薬品には一部制限がございます。詳細は弊社営業担当者までお問い合わせください。



1 シミュレーションで



常に最適化。

制御端末(JSD.NET)にて、薬品使用 量などのデータから搭載薬品を変更 した場合の効果をシミュレーション できます。使用量が少なくなってきた 薬品から使用量の多い薬品にカセッ トを切り替えることで、調剤業務のさ らなる効率化に役立ちます。PAT.

VCチェンジャーで キャリブレーションを実施。



ラベルを印刷して付け替える。



Litrea-i Ⅱ 本体で 4 カセットRFIDとラベルを照合。



5

薬品変更 完了。

手撒き要らずで、手間要らず。

業界初オールマイティカセット

ユニバーサルカセット(UC) PAT.

ユニバーサルカセット (UC) は、様々な種類の錠剤を1つの錠剤カセットで分包できる、ユヤマ独自の可変型錠剤カセットです。薬品ごとにUCにまとめて投入するだけで、様々な薬品の形状にあわせて払い出し口の形状が変わり、安全・確実に分包することができます。採用薬の増加にもフレキシブルに対応し、薬剤師の皆様の省力化・調剤過誤防止に大きな役割を果たします。

誤投入を防止。 ロック機構+画面表示



UCは標準でロック機構がついており、GS1データバーで 薬品照合を行って初めてロックが外れるようになっていま す。正面の液晶画面には患者名・薬品名が表示され、誤っ て異なる薬品を投入してしまうことを防ぎます。



※UCは4個搭載

払い出し口が変化するカセット。薬品形状にあわせて



ユニバーサルカセット(UC)

払い出す薬品ごとに、払い出し口の形状が変化。 可変式のUCが様々な薬品払い出しを可能にします。

錠剤カセット棚に装着して使用します。



対応薬品剤型

ハルルス川ハリエ			
カプセル形	軟カプセル形	裸形(膨らみ)	裸形(平)
小判形(膨らみ)	変形(膨らみ)	小判形(平)	長方形(膨らみ)

※掲載は一部です。 ※使用可能薬品には一部制限がございます。 詳しくはお問い合わせください。

な

使用方法はいたってシンプル。処方発行すると、UC前面の画面上へ必要な患者名・薬品名・錠数が表示されるので、 薬品ごとにGS1データバーで照合を行いカセットの中へ必要数をまとめて投入。

「朝が●個、昼がなしで、夕が●個・・・」と考えながら撒かなくてよいので、分包作業のスピードアップを図れます。

>

1

UC前面パネルへ 投入薬品情報が表示されます。



2

GS1データバー照合後、 当該UCが前出。 ※PTPシートでもOK!



3

分包に必要な薬品数を まとめて投入。



4

UCをセットし直す。



5

分包 スタート



固定UC)。

特定の薬品の分包頻度が高いときに、薬品を指定して、 固定UCとしても使用可能。状況にあわせてフレキシブル にお使いいただけます。

※UCには乾燥剤を入れられませんので、吸湿性の高い薬品を長期間滞留させることはおすすめしません。



使 残薬を確実に回収。 用 後 は 視 チェックで

UCの使用後は、必ずロック解除スイッチを 押してUCを取り出し、目視で残薬が無いか を確認後、元に戻して初めて情報がリセッ トされるようになっています。

なお、5錠までは、自動回収で分包される機 能もついており、安全性を高めています。

※自動回収後にも目視確認が必要となります。



ロック解除

UCの上部を取り外して薬品が触れる部 分を分解できるようになっているため、 お手入れもカンタンに。すみずみまでき れいに清掃いただけます。

※薬品接触部分が3つのパーツに分かれます。



カンタンに行えます。

半錠分包はカセット運用で手間を削減。

半錠対応UC(ユニバーサルカセット) 第二世代 PAT. Option

手撒き分包が多い半錠の 手撒き間違いを防いで 安心・安全に。



整数錠と

─ 半錠、どちらも投入OK!

※ただし1つのUC内に整数錠と半錠の混在は不可



対応薬品数が大幅アップ!既存の半錠対応UCと比べ

今までの対応薬品剤型(第一世代)

裸形(膨らみ)	裸形(平)

※整数錠・半錠の両方の分包に対応していますが、一部投入できない薬品があります。

※詰まり防止の逆転動作等により、半錠の分包は整数錠に比べると払い出し速度が遅くなる傾向があります。また、薬品の形状により、整数錠の分包でも通常のUCと比較して払い出し速度が遅くなる場合があります。

新たな対応薬品剤型(第二世代)

糖衣形	小判形(糖衣)	変形(糖衣)	長方形(糖衣)	小判形(膨らみ)
小判形(平)	長方形(膨らみ)	長方形(平)	変形(膨らみ)	変形(平)
三角形	四角形	多角形		

固定半錠力セット

Option

定 包化が多いほど、



半錠にカットした錠剤を充填しておけば、固定カセットと同様に 使用可能な新力セットです。事前に充填しておけば全自動で払い 出しを行うので、都度ヒトの手を介すことなく、スピーディーに、 安全に、半錠一包化を行っていただけます。

※使用可能なカット精度は重量比±10%以内。

対応薬品剤型



※VCのように薬品を変更することはできません。


※対応カセットサイズはSSのみです。

※半錠カットした薬品は吸湿性が高いため、業務終了時に取り外して薬品を回収し、別の場所で保管することを推奨します。

別売

多錠半錠カッター PAT.P バンディカッタァ で

高精度の半錠カットで スムーズな半錠一包化を!

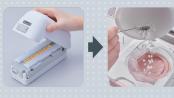

半錠対応UCと固定半錠力セットは ハンディカッターとの相性抜群。 投入薬品は本製品のご使用を推奨します。

ハンディカッターで必要数をまとめて半錠にした あと、半錠対応UCや固定半錠カセットに投入!

半錠用力セット PAT.

Option

分包まで全自動。

業界で初めてユヤマが実現した、錠剤を機械(カセット)内で1/2にカットして分包する全自 動ハーフカッター機構。専用カセットにそのまま整数錠を充填するだけで、分包まで自動的に 行います。カットしていない錠剤との一包化も可能です。







フルオートで1/2

割らずにそのまま!







一包化

当機構はオプションであり、本体 | 台につき最大8カセットまで2個単位で最下段から搭載可能。 また、当機構装着時は通常カセットも搭載数は減少します。



錠剤カセットは3種類。

先進のカセット機構を装備。その安全性はトップクラス。

フタロック機構付き錠剤カセット PAT.

Option

0402通知以降調剤業務のシフトが拡大している中、誰でも気軽にできてしまう事への対策が必要になりました。そこで「錠剤の抜き取り」、「錠剤を戻す」、「欠品時の充填」といった、薬品の入れ間違いと在庫管理の過不足発生リスクを回避する「フタロック機構」が新たにラインアップされました。

誰が、いつ、 何を充填したかを 記録 フタロックを解除するためには、操作者、 錠剤カセットのRFIDチップ、薬品外箱の GS1コードの照合が必要です。これによって 「誰が」「いつ」「何を」の記録が残り、より 厳密な薬品管理を行うことができます。



※本製品は、固定カセット、固定半錠カセット、半錠用カセット、VC (パリアブルカセット)が対象となります。
※フタロック機構は後付けはできません。





トをセット 照合OKでフタロックが解除 ※フタの開閉は手動です

充填テーブルにカセットをセット

錠剤力セット

「全自動」に不可欠な錠剤カセットが130個搭載できます。

さらにオプションのスライドラックユニットを付加することで28個カセットを増設できます。

一包化が多い薬品は大容量のM カセットに搭載することで、充填の頻度を減らせます。

また、SSSカセットには大量に分包しない薬品を都度必要数のみ充填するなど、 運用に応じてサイズの異なるカセットを使い分けていただけます。





スライドラックユニット搭載時

ヒューマンエラーゼロへ。 RFIDチップ搭載のフリーカセット。PAT.


錠剤カセットの装着位置を自動認識するRFIDチップ搭載のフリーカセット。カセットの装着間違いに起因する調剤過誤は起こり得ません。特定のカセットを取り出したい時も、本体モニターから薬品を選択する、もしくは薬品のGS1データバーを読ませるだけで自動で前面にカセットが到着し、都度探す手間から解放されます。また、RFIDチップには、薬品を特定する情報だけでなく、同じ薬品を複数の錠剤カセットに充填して運用する際の枝番管理情報や、機械自体の号機管理の情報、充填している錠剤の強度や跳ねやすさの情報などが入っており、良好な運用を可能にする工夫が施されています。



錠剤事前欠品集計機能で、 より効率的な運用を。

処方データの払い出し必要量と、機械本体の薬品在庫量をもとに、事前に欠品を予測し、 充填すべき薬品を表示する機能を搭載。

リストに表示された薬品をまとめて用意することで、分包時欠品による機械停止時間がなくなり、効率的な運用につながります。

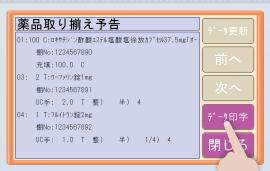

本体モニター画面に払い出しに必要な薬品の 欠品情報を随時表示します。 楽品取り揃えリスト 19集 07/30 08:05 分割中(0000 0008:14 サギンと単原スフルス等 第2年のスプレースストルのエー ※数:100 08:05 ボデ 0000 恋女 ボデ 0010 恋女 ボデ Rol 第3:09

0011:ワーファリン総1mg 総数: 2 T 側No:123456789 UCF: 2.00 T 整) 半) 4 0011 患者 次部 Rel 整) 半) 4

0012:フルイトラン錠2mg 総数: 1 T 棚Mo:1234567892 UC手: 1.00 T 整) 半) K) 0012 患者 尖子 の1 整) 半) K)

データ印字ボタン を押すと、欠品情報をジャーナル用紙に印字して出力できます。

GS1データバー照合で充填を確実に。 充填間違いは「仕組み」で回避。

錠剤カセットに薬品を充填する際には、錠剤カセットのRFIDチップと薬品外箱のGS1データバーという2つの対象物を照合することで、充填間違いを防止。また、錠剤カセット内の薬品が欠品になったときも、同様の充填チェック機能を使用しなければ、欠品状態が解除されず、薬品の払い出しがされません。誤った薬品を一包化してしまうリスクを仕組みによって回避することができます。





RFIDで錠剤カセット認識 PAT.

GS1データバーで薬品照合

ロット管理機能でより正確に検索・把握。

調剤日や薬品のロット番号、薬品名などで過去の分包実績の絞り込みができるように。薬品の自主回収時など、もしものトラブル時に当該ロットの薬品をお渡しした患者様をより正確に把握することができます。また、外部委託時の管理強化目的でもご活用いただけます。



ロット実績検索画面

棚卸業務の負担を軽減。錠剤カウント機能を実装。





錠数管理の負担を軽減する 新発想の錠剤カウント機能。PAT.

従来、錠剤分包機に搭載している錠剤カセット内の錠数を棚卸する場合、 実際に錠数を手作業で数えたり、多くの時間と労力を必要としていました。 そこで、錠剤分包機内で錠剤を数えることができる「錠剤カウント機能」を 新たに搭載しました。カウント後の錠剤数も自動で登録できますので、厳格 な在庫管理が可能となりました。



RFIDチップ搭載の専用カセット。

Option

下段にある錠剤力セットを差し替えてご使用いただけます。複数力セットを同時に カウントでき、従来の棚卸業務を大幅に効率化します。

※カウントカセットは、錠剤カウント機能使用時のみ装着します。それ以外の場合は、通常のカセットを装着し使用できるためカセット数を減らすことなくご利用いただけます。
※オプションでの注文が必要です。



カンタン!使用方法



カウントカセットを装着



カウント開始



カウントが完了したカセットNo.が表示され薬品名が グレーになります!

Point

元カセットへの戻し作業もRFIDチップのダブルチェックで安心



充填テーブルにカウントカセットを セット



充填テーブルに元カセットをセット



照合OK

□ エラー抽出

表示順序 ・日付、薬品コード ・日付、薬品コード, カセットNO ・薬品コード, 日付 ・充填者, 日付



カウントした錠剤を元カセットへ 戻す

111.0 正常終了

制御用PC画面

Point

カウント結果も確認可能



戻し作業の際、カウント結果を確認することができます。 さらに、カウント結果をJSD.NETに登録し、出力することも可能です。

本体パネル画面

効率化と安全性を飛躍的に向上。

視認性の良いメインパネル。ランニングコストを抑える分包紙

分包紙幅は5段階で選択可能。

可変ローラー×薬包紙の最適幅制御機能で、 ランニングコストを正確に管理。

1包あたりの横幅は、60・70・76・80・90mmの5種類からご自由に選択が可能な可変ローラー機構を採用しています。さらに、薬品マスター上に錠剤サイズ係数を入力しておけば、1包あたりの最適量を計算し、自動的に最適幅で分包することも可能です。



各種情報をクリアに表示する 8インチ液晶操作パネル。 簡易分包もここから入力OK。

((((音声辞》)))

分包情報や分包紙残量など各種情報を表示するメインパネルは、8インチ液晶を採用。分包作業中の包数や各種情報を音声とともにわかりやすく集中表示します。さらに、この画面から緊急時や夜間時の簡易分包も行えます。

(入力=薬品名、分包パターン、用法、日数。印字項目は用法のみです。)







簡易分包発行画面

口常のメンテナンス性。人ペックだけでは語れな



錠剤カセット装着サッシ部も 36°の広角オープン。

シリンダ中心部の錠剤経路は日常のお手入れがしやすい設計。 錠剤カセットを装着しているサッシ部を36°もの広角に開放できるので、手 軽に簡単なお手入れが可能です。また、シューターは取り外せるので、清掃 などのメンテナンスが容易に行えます。PALP

ホッパー部も容易に取り外し可能、 お手入れカンタン。

全ての錠剤が通過する大型ホッパー部。機械から手前に引き出すだけで、 簡単に取り外すことができます。手撒き分も含めて全薬品が通ることを考え ると、ホッパー部の清潔度は非常に大切なポイント。目に見えない部分に こそ、安心設計が盛り込まれているのです。





DTA(手撒き錠剤アダプター)48包分で、 カセット搭載外薬品に対応。

DTA(手撒き錠剤アダプター)を48包分ご用意。分3の2週間処方の手撒き分包に おいて十分な機能を持ち合わせています。もちろん、2回に分けて錠剤を手撒きする、

いわゆる2度撤きも可能なので、長期処方にも対応します。また、トレイイメージに撒き位置・錠数が記載されたDTA指示書(印字する/しないを任意設定可)を本体ジャーナルプリンターから出力させることもできます。





薬品ごとにLEDガイド表示を点灯できるように。 点滅、消灯を使った表示方法も追加。

ユーザー様の声にお応えし「薬品ごと」にもLEDガイド表示ができる新機能が追加されました。加えて、既存の点灯方法だけでなく、点滅・消灯を使った表示方法を任意で設定することができるように。半錠や管理薬品を撒く際には「点滅」、撒かないマスには「消灯」を設定



することで、薬品をどのマスに置けばいいか瞬時に判断ができるため、撒き間違い を減らし、効率的に作業を行うことができます。

届けるのは「安心」をのせた分包紙。

患者様や環境にも配慮した「こだわり」。







専用カセット 左:フルサイズ用 右:ハーフ用

使用できる印字リボンは、モノクロ(黒)、ハーフ (黒)、4色(カラー)の3種類。ニーズに合わせてお 選びいただけるのはもちろん、詰め替え式のリボン を使用することで、環境に優しく、ラ ンニングコストも下げることが可能 になりました。_{PAT.} Refill Ribbo

クリーニングリーダー®付の2つ折分包紙。PAT. 印字のフリーレイアウト、詰め替え式のインクリボンを採用。

ユヤマ独自の次世代分包紙「クリーニングリーダー®付分包紙」は、セット時に先端部分がヒーターローラー をクリーニングします。機械を長くご使用いただくためのユヤマからのご提案です。

分包サイズは任意に、60、70、76、80、90mm/包の5段階の分包紙幅から分包する内容量やコスト面で最適な サイズを選択できます。



■4色リボン(カラー)印字



■モノクロリボン(黒)印字



■ハーフリボン(黒)印字









■ピクトグラム印字



●業務を楽に

これまで分包後に、マーカーでラインを 引いていた先生方の作業負担を減らす ことができます。

作業時間※

1時間40分



※分3×14日分=42包を1処方とし、1日50処 方と仮定した場合に、1処方のライン引きに 2分を要するとして算出。

●リーズナブルに

導入しやすい価格で4色の色分け表示 を実現できます。

カラー印字コスト※

約31.4% ダウン

※4色印字リボンの場合と1色印字リボンに本 オプションをあわせて利用した場合の1包あ たりの印字コストを比較。

※イニシャルコストは含んでおりません。

●情報量 約2.5倍※

モノクロリボン(黒)との併用により、印字可能領域を確保し、必要な医薬品情報とカラーの両立を実現。



※4色ライン利用時の文字印字可能領域の比較。

使いやすさにこだわった標準性能。

動画マニュアルで 消耗品交換やメンテを 分かりやすくガイド。

音声付き動画マニュアルを制御用PC 側に搭載。また、機器本体に貼付している2次元コードをスマホで読み取れば、 同様のマニュアルをその場でご確認い ただけます。





プル・ラウンド方式で 分包紙も容易に交換。

紙交換がこれまで以上に簡単に。プル・ラウンド方式により、分包機構部全体を前面にスライドさせたうえで、すぐ目の前にまで分包紙セット部が引き出せるので、交換作業が無理のない姿勢で行えます。






服用時に差が出る スパットカット[®] _{意匠登録}

高カット性分包紙「スパットカット®」は、薬包上部の圧着面のどこからでも簡単にカットできます。しかも、投薬時に輸ゴムで縛った際には切れにくい絶妙な処理が施されています。

分包された薬包には、横方向にも簡単にカットしやすいノッチ(切れ目)が1包毎に自動で入ります。

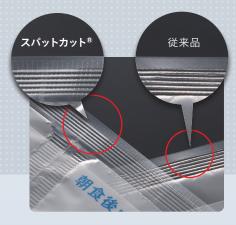



ECOモード

ユヤマの分包機は省エネ・エコへ配慮 した、非稼動の待機電力を最大で約 20%以上抑制する「エコモード」を搭載 しております。



SPECIFICATIONS

卓越した機能群で調剤業務を支える、Litrea-i Ⅱの仕様。

全自動錠剤分包機

Litrea-i Ⅱ











製 品 名	鑑査支援機能付き全自動錠剤分包機 Litrea-i II		
型 式	YS-TR-130FDXII(i)-VC	YS-TR-158FDXII(i)-VC	
	YS-TR-130FDXII(i)-VC-FL(フタロック) YS-TR-158FDXII(i)-VC-FL(フタロッ		
分 包 速 度	最大 約40包/分(刻印判別時)		
	最大 約60包/分(撮影なし時)		
1 包 寸 法	横(90·80·76·70·60mmの5段階)×縦70mm		
1包内の最大錠数 	25錠 ※薬品サイズにより異なる場合があります。		
分包紙種類	セロファンポリ(2つ折りタイプ)・白ベタ/白帯/無地 ※名入れ分包紙は条件により使用できません。		
外 形 寸 法	幅660mm×奥行691.5mm×高さ1982mm	幅825mm×奥行691.5mm×高さ1982mm	
本 体 質 量	約350kg	約430kg	
使 用 電 源	AC100V±10 50Hz/60Hz ※VCチェンジャ	ャーも同様	
消費電力	Litrea-i II:1060VA (MAX) VCチェンジャー:348VA (MAX)		
搭載錠剤	M 66個	M 86個	
カセット数	SS 50個	SS 58個	
	SSS 14個	SSS 14個	
搭載UC数	4個		
錠 剤 カウント	搭載開口数:18個 カウント速度:最大約138錠/分		
カセット検 索	カセット番号、薬品名、バーコードによる検索可能		
手撒き錠剤アダプター	48包/回		
音 声 通 知	操作ガイド、消耗品交換のお知らせ		
錠剤検出方式	フォトセンサ方式		
錠剤供給方式	センターフォール方式(自然落下)		
薬 包 紙 印 字 フリーサイズフォント、印字レイアウトフリー、			
* 0 M D 于	モノクロリボン(黒)印字、ハーフリボン(黒)印字、4色リボン(カラー)印字		
マスター更新	VPN/DVD/HPダウンロード の3通り		
増 設 可 能 台 数	4台		
使用環境	使用温度範囲 10℃~ 35℃ ※動作保証範囲 使用湿度範囲 15% ~ 85%(ただし結露をしない) ※温度35℃のときは湿度48% 以下 湿度85% のときは温度28℃以下で使用してください。		
オプション	VCチェンジャー、フタロック機構付き錠剤カセット、半錠用カセット、 半錠対応UC、固定半錠カセット、カウントカセット、スライドラックユニット、 自動4色ペンライナー、6色LED対応DTAユニット、タブレバイザー、地震対策ユニット		

製	F	1	名	鑑査支援端末		
照	合	内	容	錠剤:刻印、形状、サイズ、色、個数 カプセル:形状、サイズ、色、個数		
識	另	IJ	率	95%以上 ※当社規定の測定方法による		
仕			様	台置き仕様	床置き仕様	
外	形	4	法	幅241.2mm×奥行431.1mm×高さ291.1mm	幅202mm×奥行470mm×高さ562mm	
本	体	質	量	約13kg	約20kg	
使	用	電	源	AC100V±10 50Hz/60Hz		
消	費	電	カ	480VA(MAX)		
Ŧ.	ニタ	サ 1	′ ズ	21.5インチ(タッチパネル)		
接	続可	能台	数	4台		
デ -	- タ保	有其	月間	100日以上		
使	用	環	境	使用温度範囲 -20℃~70℃		
オ	プミ	ショ	ン	床置き仕様、スライドラックユニット内側収納仕様		

※スムーズな分包が行えるよう、材料や外形等の特徴が強い医薬品を使用する場合は弊社営業担当者までご相談ください。 《設置上のご注意》

- →アースを必ず接続してください。●壁から10cm以上離して設置してください。●鑑査支援端末は外置きになります。●直射日光の当たる窓際に設置しないでください。●水平に設置してください。●その他、安全にお使いいただくために、取扱説明書をよくお読みになった上でご使用ください。

優れた機能性を、 高い操作性でカタチにした制御用PC

洗練された画面で操作性に定評がある制御用PC。その処方入 力画面は「患者属性」「分包内容」「処方内容」等必要な情報 が分かりやすく表示されております。オプションとして追加され たユニバーサルカセット(UC)は、対応している薬品かどうかを 「○」の有無で一目でご確認いただけるなど分かりやすい画面 表示となっております。

マスタ配信方法

マスタ配信は3通りの方法から選択

配信の方法は3種類(有料)となります。 ご利用施設の設置環境によって最適なサービスを選択頂けます。

タブソートに必要不可欠な薬品マスタデータベース。

VPN

クラウド型 VPN配信サービス DVD

月一回送付する DVD配信サービス

弊社ホームページから ダウンロードする マスタ配信サービス

震度7でも倒れない秘密。 ++各種分包機用耐震金具++

地震大国、日本。記憶に新しいところでも、東日本大震災や熊本地震など、痛ましい被害を生んだ大規模な地震 が思い起こされます。調剤室には欠かせない各種分包機にも、耐震対策が求められるのではないでしょうか。そ こで万が一の事態に備えた耐震対策として、キャスター部に専用金具、台座部にJQA公認の耐震マットを取り 付けた専用金具をオプションでご用意。実験では、震度7に至る揺れを再現しても微動だにしませんでした。

大量の分包品も 自動で巻き取り!

自動巻き取り装置

分包品を折りたたむ手間を 省き業務効率が上がります。



SUSTAINABLE

YUYAMAのSDGsへの取り組み これまでも、これからも。

私たちYUYAMAは、SDGs達成に向け、 持続可能な社会実現を目指し、これからも 活動を続けていきます。

SDGs…持続可能な開発目標 (Sustainable Development Goals)。2015年9月の国連サミットにおいて採択 された、2030年までに地球規模で解決すべき国際目標。17のゴール・169のターゲットから構成されています。



NSIPS®とは、日本薬剤師会が提案する薬局向け コンピュータシステム間の連携システムです。 (商標登録 第5214610号)



分包紙は別売となっております。弊社製純正分包紙をご使用ください。 かるようと思うなが販売対象物であり、それを巻いている芯(機能製芯管)は、所有権を 留保しており、分包紙を使い切る間、一時的に貸与させていただいております。ご利用後は、 弊社または分包紙販売店の社員が回収にお伺いいたしますので、ユーザー様で保管し、第三者 に対して売却、譲渡、貸与すること等を固くお断りいたします。



製造元 湯山製作所

^{発売元} 株式会社 **工**



大阪本社

東京本社

〒561-0841 大阪府豊中市名神口1丁目4番30号 TEL.(06)6868-5155(ft) FAX.(06)6868-5154(ft)


〒130-0012 東京都墨田区太平2丁目10番10号 TEL.(03)3829-9511(代) FAX.(03)5611-2011(代)

※「Your Partner in Medication」は株式会社湯山製作所の登録商標です。

カタログの掲載内容は2025年10月現在のものです。

製品の改良のため仕様・デザインを予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

ご購入に関するお問い合わせ・ご相談・お申し込みは下記へご一報ください。

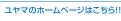



世界各国のユーザー様の 活用事例はこちら!!









