

洗練されたデザインと
機能性を織り合わせた
超小型1枚円盤モデル



全自動散薬分包機

*Mini-***R**₄₈

FULLY SOPHISTICATED MODEL

長い間親しまれてきたMini-R45が、コンパクトさはそのままに、あらゆる観点から細部にまでこだわって改良され、「安心できる」・「使いやすい」分包機として生まれ変わりました。

手撒きを支える
LED GUIDANCE

手撒きを減らす
UNIVERSAL CASSETTE

HIGH FUNCTION

高機能

- 滑りのよいオートフィーダー
- 手撒きも安心な6色LED手撒きガイド※
- 搭載薬品を自在に変えられる、VC（バリアブルカセット）※
- 錠剤手撒きいらず、UC（ユニバーサルカセット）※
- セット位置フリーで充填も安心なRFID錠剤カセット※

※オプション




USEFUL

使いやすさ

- ◆ 最大分包速度アップ
- ◆ 角度の調整が可能なアーム式の操作モニター※
- ◆ 見やすいLED操作パネル
- ◆ 最大騒音2dBダウンでより静かな調剤環境に
- ◆ 隙間なく、異物混入も防止できるラウンドシェイプの外装
- ◆ 内部はフラット設計
- ◆ 着脱式でお手入れ簡単なフィーダーや円盤クリーナー
- ◆ 持ち手がついて握りやすい掃除機ノズル

※オプション

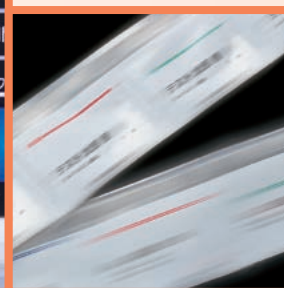



コンパクト、
省スペース



業界最小クラス！

わずか 69.5cm幅

TOPIC



HIGH FUNCTION

薬剤の特性ごとに自動調節 精度の高い分包を実現する すべりのよいオートフィーダー


産学連携で培った新たな技術を実用化し、フィーダーへの最適な表面処理加工を施すことにより、付着しやすい散薬において、付着の程度を半減させることに成功しました。

散薬の均一な配分を可能にする「コントロール・プロジェクション(突起)」との組み合わせで、高い分包精度を実現するとともに、コンタミのリスクも軽減します。



調剤現場に安心とゆとりをもたらす

人的ミスによる事故を防ぐ 機構・システム

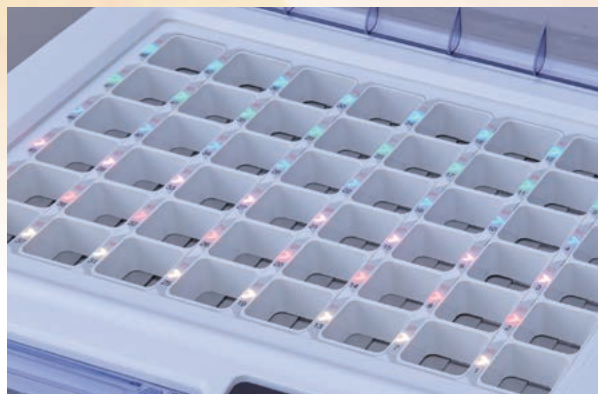

LEDガイド

錠剤の手撒きも 6色LED手撒きガイド表示で安全に

用法もしくは薬品ごとに6色(青・赤・緑・黄・紫・水色)で色分けガイド表示することで、一目で次の錠剤をどのマスに手撒きするかが分かります。視認性が高いので、錠剤手撒きがある場合にも安心です。

安心してお使いいただくための 安全な機構

分包動作中に上部・前面カバーを開くと自動停止する安全機構や、高温になるヒーターローラー部のローラーカバーなど、どんなにでも安全に、安心してご使用いただける配慮が行き届いています。



入力しやすい操作画面

制御用PC(PX Tab)を標準搭載し、基本的な操作は全て画面タッチで行えます。入力方法は複数あり、使用者にあわせてフレキシブルな使い方が可能です。また機械本体操作のみでも分包できる簡易発行機能あり。



簡易入力画面

動画マニュアルでわかりやすくガイド

消耗品交換やお手入れの音声付き動画マニュアルも制御用PC(PX Tab)に搭載。また、機器本体に貼付している2次元バーコードをスマホで読み取れば、同様のマニュアルをその場でご確認ください。



分包紙の交換

薬品ごとにLEDガイド表示を点灯できる ように点滅、消灯を使った表示方法も追加

OPTION

ユーザー様の声にお応えし「薬品ごと」にも表示ができる機能が追加されました。加えて、既存の点灯方法だけでなく、点滅・消灯を使った表示方法を任意で設定することができるように。薬品をどのマスに置けばいいか瞬時に判断ができるため、撒き間違いを減らし、効率的に作業を行うことができます。

PC画面には錠剤の手撒き位置と錠数を薬品ごとに表示可能。PAT.



※用法もしくは薬品ごと、どちらのLEDガイド表示を点灯するかはPC画面上で選択できます。

散薬鑑査システムとの連動で 入力ミスを防ぐ

OPTION

PAT.

Mini-R48は、電子天秤一体型鑑査システムonedy EX2との連動が可能です。onedy EX2で鑑査済みの調剤データは、分包機側に設置するRFID読取装置(オプション)でRFID秤量皿を読み込ませるだけで、すぐに制御用PC(PX Tab)側で処方展開されます。分包機側の最大包数を予め登録しておけば、自動で処方分割を行う機能も搭載しています。



onedy EX2

Mini-R48

Yuyama 分包機サポート

Mini-R48



サポートサイト



すみずみまで行き届いた使いやすさへのこだわり

調剤業務をスムーズに行えるしなやかさ

最大分包速度アップ 56包/分※

分包速度は最速56包/分の高速分包を実現。また、56・51・45・40・35・23包/分の6段階からチョイスすることができ、作業効率と分包精度の両面からの最適値にて分包いただけます。

※指定条件に限る。薬品の性質やカセット位置等の諸条件により、分包速度は変動いたします。



内容量に応じて 調整できる分包サイズ

分包サイズは任意に、60・70・76・80・90mm/包の5段階の薬包サイズから分包する内容量やコスト面で最適なサイズを選択できます。



見やすい 角度に調整 できる操作画面

OPTION

作業時の立つ位置によって画面が見にくいといった問題は起こりません。モニターは上下左右に角度を振れるため、ご自身でポジションを調整することができます。



LEDで 見やすい本体操作パネル

本体操作パネルはLEDタッチパネル方式。

LEDライトがはっきりと目に飛び込んでくるだけでなく、フィーダーボリュームをドラッグやタップで調整するなど、直感的な操作が可能です。

見た目すっきり、 凹凸のないなめらかなデザイン

Mini-R48は、従来機に比べ圧倒的に凹凸の少ないスタイリッシュなデザインを採用。


隙間のない開閉式のホッパー蓋で異物混入を防止できるだけでなく、凹凸がないことで清掃性も向上しました。



錠剤カセットは、オーダーからセルフの時代に

セルフ・キャリブレーション・カセット バリアブルカセット (VC) PAT.

OPTION

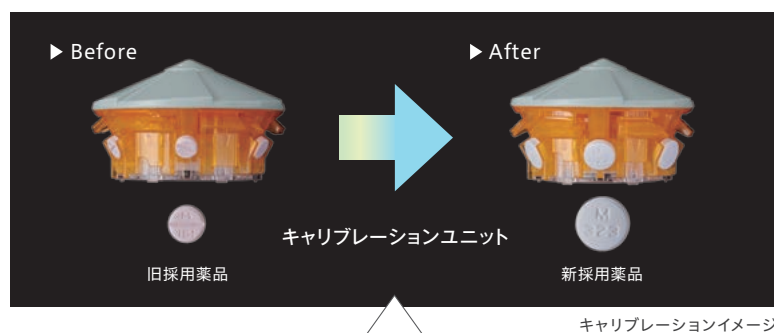

搭載薬品を自在に変えられる錠剤カセット

後発薬の採用時や、医薬品供給不足による急な採用薬品変更時には同じ錠剤カセットは使えませんでした。その常識を覆す新たな錠剤カセットが誕生しました。分包機の制御用PC (PX Tab) と、キャリブレーションユニット「VCチェンジャー」(オプション) を使用することで搭載薬品が容易に変更できます。新たな注文の手間も時間もいらない、変えたい時に現場で、そしてご自身で変えられる新発想の錠剤カセットです。

選べる! キャリブレーションユニット

手順に従って、長さ、厚み、幅の3つのサイズをキャリブレーションユニットで変更。 ※オプションで選択できます。

手動式

セルフVCチェンジャー


- ▶ 手動でキャリブレーション
- ▶ 軽量で持ち運び簡単!



自動式

VCチェンジャー

- ▶ 自動でキャリブレーション
- ▶ よりスピーディーに変更可能!

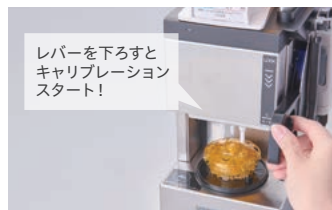

※オプションでどちらかを選択できます。

フルカセット運用でも安心


錠剤カセット付き機構の購入を検討する際、後々の採用薬品の変更を考慮し、最初からカセットをフル搭載しないユーザー様も少なくないのではないでしょうか？ VCが搭載されたことによって、いつでも搭載薬品の変更ができますので、後々のために予備を残しておかなくてもよく、導入当初から最大限にその効果を発揮できます。



キャリブレーション画面 PAT.

カセットサイズは2種類

VCはM、SSの2種類をご用意。分包頻度にあわせてサイズを選択できます。ただし、C+カセットはMサイズのみとなります。

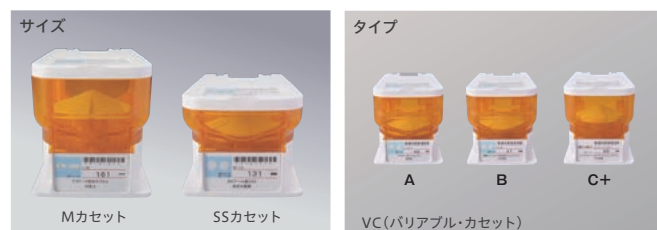


サイズ	M・SS	M・SS	M
タイプ	A	B	C+
対応薬品	平丸(小)	平丸(大)	カプセル
	糖衣形 三角形(膨らみ/平)	四角形(膨らみ/平) 六角形(膨らみ/平)	
	小判形(膨らみ)	変形(膨らみ)	小判形(平)
			変形(平)

※VCは薬品形状により3種類のタイプがあり同タイプの形状の薬品であれば自由に搭載薬品の変更が可能です。

※上記以外の薬品形状には対応していません。対応できない薬品は従来の錠剤カセットでの対応となります。

※使用可能薬品には一部制限があります。詳細は弊社営業担当者までお問い合わせください。

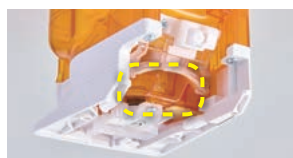

ローターロック機構

ローターが勝手に回転しないローターロック機構を搭載。医薬品が滑り落ちにくくなりました。

カセット推奨機能により常に最適な分包環境へ PAT.

分包機の制御用PC(PX Tab)にて、薬品使用量などのデータから搭載薬品を変更した場合の効果をシミュレーションできます。使用量が少なくなってきた薬品から使用量の多い薬品にカセットを切り替えることで、調剤業務のさらなる効率化に役立ちます。

① シミュレーションで変更するカセットを決定。



※セルフVCチェンジャーの場合。

② セルフVCチェンジャーでキャリブレーションを実施。



③ ラベルを印刷して付け替える。

※プリンターが別途必要となります。



④ 分包機本体でカセットRFIDとラベルを照合。



⑤ 錠剤10錠分の払い出しテストを行う。

※セルフVCチェンジャーのみ。



⑥ 薬品変更完了。

オールマイティな払い出しでより高効率・安全に

ユヤマ独自の可変式 ユニバーサルカセット(UC) PAT.

OPTION

「手撒きいらず」で手間いらず 「撒き間違いなし」で調剤過誤防止

UNIVERSAL CASSETTE

1つのUCで様々な薬品を分包！
採用薬の増加にも
フレキシブルに対応できます。

薬品ごとにUCにまとめて
入れるだけで分包完了！
手撒き間違いを防止し、
安全性を高めます。




薬品形状にあわせて可変する錠剤カセット

払い出す薬品ごとに、払い出し口の形状が変化。可変式のUCが様々な薬品の払い出しを可能にします。



ユニバーサルカセット(UC)

(あらゆる形状の錠剤に対応します。)

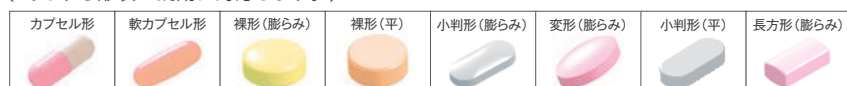

※掲載は一部です。※使用可能薬品には一部制限があります。詳しくはお問い合わせください。

ロック機構+画面表示で誤投入を防止

UCは標準でロック機構がついており、GS1データバーで薬品照合を行って初めてロックが外れます。正面の液晶画面には患者名・薬品名・錠数が表示され、異なる薬品の誤投入を防ぎます。



シンプル・スピーディーな使用方法

使用方法はいたってシンプル。処方発行すると、UC前面の画面上へ患者名・薬品名・錠数が表示されるので、薬品毎にGS1データバーで照合を行い、カセットの中へ必要数をまとめて投入。
「朝が●錠、昼がなしで、夕が●錠…」と考えながら撒かなくてよいので、分包作業のスピードアップが図れます。



UC前面パネルへ投入薬品が表示されます。



GS1データバー照合後、当該UC前出。



分包に必要な錠数をまとめて投入。



UCをセットし直す。

分包スタート

使用後は目視チェックで残薬を確実に回収

カセットの使用後は、必ずロック解除スイッチを押してカセットを取り出し、目視で残薬が無いかを確認後、元に戻して初めて情報がリセットされます。なお、5錠までは自動回収で分包される機能も搭載し、安全性を高めています。



※自動回収後も目視確認が必要となります。



お手入れも楽に行えます

UCの上部を取り外して、薬品が触れる部分を分解できるようになっているため、お手入れも楽に。すみずみまできれいに清掃できます。



※薬品接触部分が3つのパーツに分かれます。
※水洗い不可。

薬品固定での使用も可能(固定UC)

特定の薬品の分包頻度が高い時に、薬品を指定して、固定UCとしても設定可能。状況にあわせてフレキシブルに使用できます。

※UCには乾燥剤を入れられませんので、吸湿性の高い薬品を長期間滞留させることはおすすめしません。



半錠分包の新スタンダード。安全性と効率性を追求した半錠対応カセット。

半錠対応 UC (ユニバーサルカセット) 第二世代 PAT.

OPTION

手撒き分包が多い半錠の、
手撒き間違いを防いで安心・安全に。



● 整数錠と
● 半錠、
どちらも投入OK!

※ただし1つのUC内に整数錠と半錠の混在は不可です。



既存の半錠対応UCと比べて、対応薬品数がアップ!

今までの対応薬品剤型 (第一世代)

裸形 (膨らみ)	裸形 (平)
	

+

新たな対応薬品剤型 (第二世代)

糖衣形	小判形 (糖衣)	変形 (糖衣)	長方形 (糖衣)	小判形 (膨らみ)
				
小判形 (平)	長方形 (膨らみ)	長方形 (平)	変形 (膨らみ)	変形 (平)
				
三角形	四角形	多角形		
				

※整数錠・半錠の両方の分包に対応していますが、一部投入できない薬品があります。

※詰まり防止の逆転動作等により、半錠の分包は整数錠に比べると払い出し速度が遅くなる傾向があります。また、薬品の形状により、整数錠の分包でも通常のUC使用と比較して払い出し速度が遅くなる場合があります。

さらに多くの錠剤カセットが搭載できるように。

錠剤カセットのモーターベース機構を新たに見直したことで、従来機と比較し、より多くのカセットを搭載できるように。分包が多い薬品をカセットに搭載することで、効率化を図ることができます。また、新たに登場したSSSカセットには大量に分包しない薬品を都度必要数のみ充填するなど、運用に応じてサイズの異なるカセットを使い分けできます。

※それぞれの搭載カセット数についてはP14に掲載している仕様をご確認ください。





錠剤カセット機構は多様な5種類15タイプ

長期処方の一化化に心強い 錠剤カセット機構 PAT.

OPTION

カセットパターンは5種類

後付可能

錠剤カセット機構は、下記の15タイプより選択できます。

UC…ユニバーサルカセット VC…バリアブルカセット TC…RFID錠剤カセット

UC4+VC48 UC4+TC48

UC4+VC40 UC4+TC40

VC54 TC54

UC4(棚あり)

UC4+VC48 UC4+TC48
シャッター付

UC4+VC40 UC4+TC40
シャッター付

VC54 TC54
シャッター付



SSSカセット採用で、48個のカセットを搭載。大量に分包しない薬品もSSSカセットに割り当て、UCも使用して、カセットで払い出せる薬品数を最大限にすることで、業務の効率化を推進します。

40個のカセットのうち、Mカセットが32個を占めるタイプ。分包頻度の高い薬品を容量の大きいMカセットに搭載して充填回数を削減できます。さらにUCも使用することで、あらゆる薬品に柔軟に対応可能です。

54個のカセットを搭載することが可能。薬品の種類がある程度決まっており、1つでも多くの薬品を錠剤カセットに搭載しておきたい場合に有効です。

※受注生産

分包頻度の高い薬品を中心に、UCを使用して分包業務を効率化。また、分包機上部のスペースを薬品棚としてご利用いただけます。



取り扱い薬品種が多くても、手撒きいらずに次々薬品投入できるUC8個タイプ。カセットを決めきれない面対応薬局様に最適です。

※SSSカセットはどのタイプでもTCとなります。

RFID錠剤カセットは セット位置フリーで充填も確実に


錠剤カセットはセット位置フリーで、カセットをどの位置に戻しても機械側でどの薬品かを認識します。戻し間違いによる誤払出が発生しないので、急ぎのときも安心して使用できます。

また、薬品充填時にはカセットを定位置に置いてRFIDを認識させ、薬品のGS1データバーを照合することで、充填ミスを防ぎます。

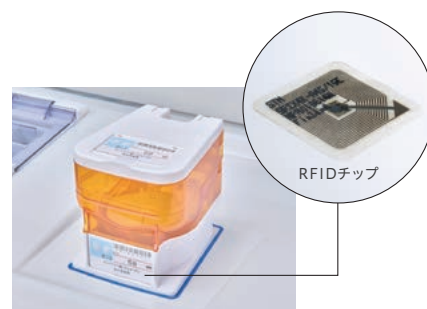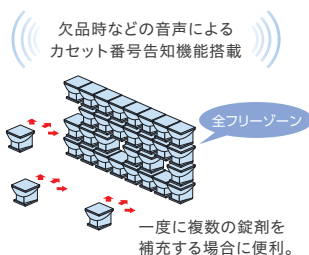

汚れ検知機能で さらに踏み込んだ丁寧なお手入れを

使用による汚れが発生すると、自動で検知し清掃を促すワーニング表示機能を標準搭載。汚れによるセンサー異常リスクを未然に防ぎ、安心してお使いいただけます。

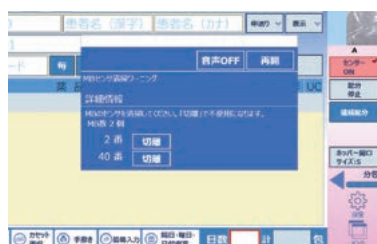

ワーニング画面

シャッターで万全なセキュリティ

(UC4+48錠剤カセット、UC4+40錠剤カセット、54錠剤カセットで選択可能)

錠剤カセット機構に手動シャッターをつけることで、セキュリティも万全に。手動タイプのため、停電時でも開閉が可能です。



UC4+40錠剤カセット

お手入れは簡単に

細かいところまで 清潔に保つ工夫



内部は清掃しやすいフラットな設計

日頃のお手入れを行いやすいよう、R円盤周辺はフラットな設計を施しました。凹凸のあるデザインよりも格段に拭き取る時間が短くなります。

集塵機構はフタの内側に配置。
ホッパー内の浮遊散薬を強力に集塵します。



ホッパー
水洗い
OK!

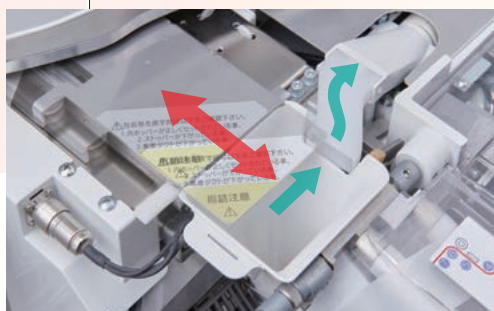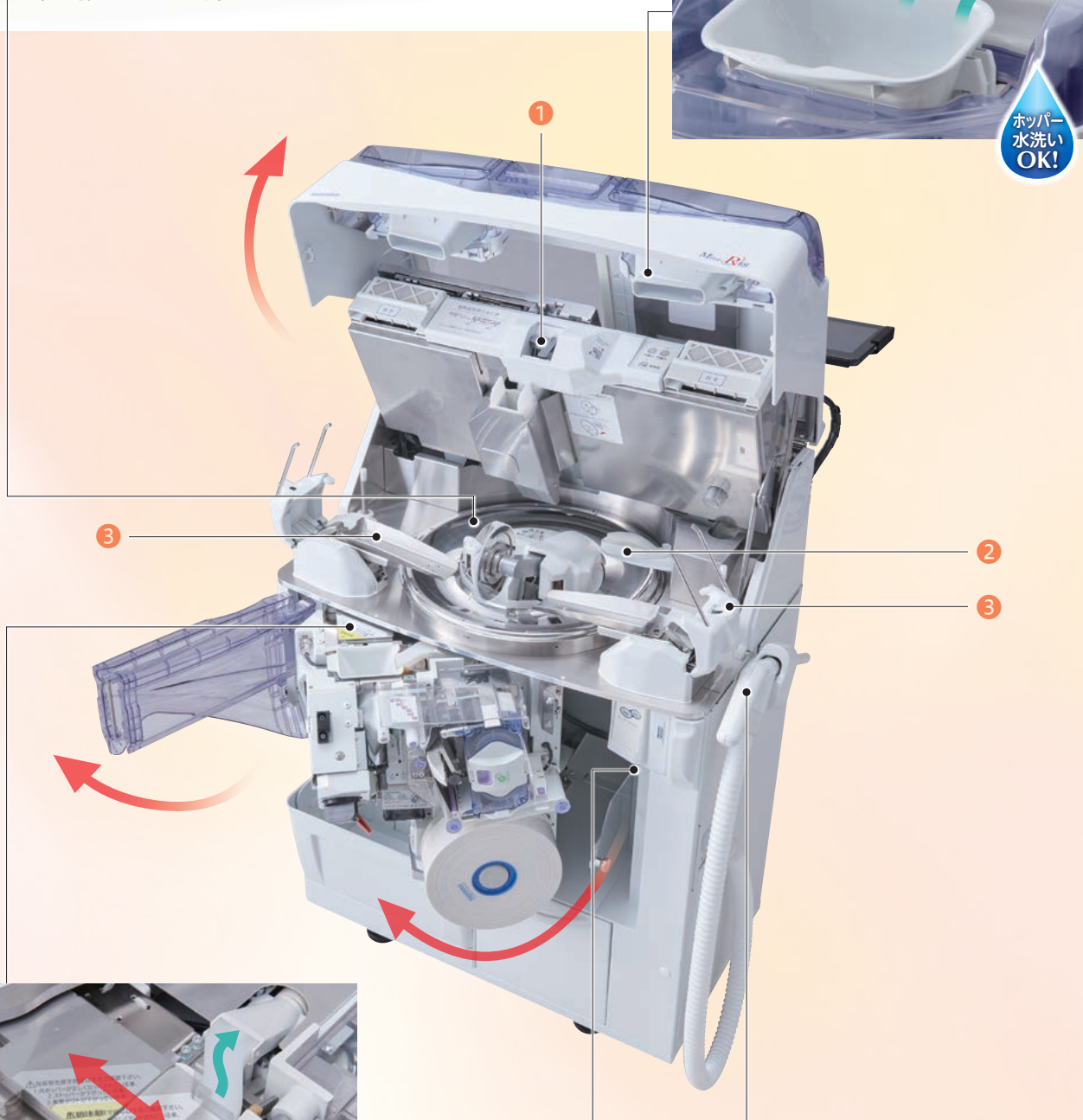

最終ホッパーは開口部を閉じて残薬を一気に吸引。

人感センサーによる
集塵機能でエコな集塵。

持ち手がついて握りやすい
掃除機ノズル。

① スクリュー清掃用の 回転ブラシも取り外しOK。



② 残薬をきれいに吸い取るスマートクリーナー。PAT.



③ フィーダーを簡単に取り外してお手入れ可能。PAT.



先駆者として培ってきた テクノロジーの進化系

バイブレーション方式 微細振動で静かにコンタミ防止

最終ホッパーは振動モーターを利用したバイブレーション方式と超音波方式のダブルでコンタミを抑制。優れた残薬抑止力を有しながらも、非常に静かな調剤環境を実現できます。



エコモード搭載で省エネにも配慮

業界に先駆けてECOモードを搭載しており、省エネ・エコへ配慮した、非稼働の待機電力を最大で約20%以上抑制します。



ヒーターローラー
省エネ仕様

90℃又はOFF

ディスプレイ
電源オフ
(操作モニター)


操作パネル
LEDライトオフ
(分包機)

患者様の服薬時にも配慮

服薬ミスを防ぐ 視認性向上ツール


環境にやさしいリフィルリボン PAT.

次世代インクリボン「Refill Ribbon(リフィルリボン)」は、リボン部だけを交換するので、原則としてカセットの廃棄がなく、環境活動にも貢献！

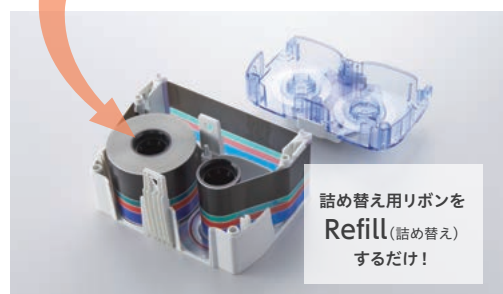

印字の種類も豊富

使用できる印字リボンはモノクロ(黒)、ハーフ(黒)、4色(カラー)の3種類。ニーズに合わせて選択できます。

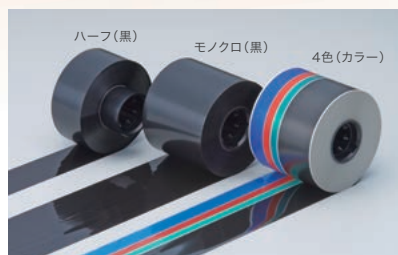

患者さんに分かりやすいビジュアル情報を提供できるように、各種バーコード・QRコード※や図形に加えピクトグラム(絵文字)も印字が可能です。



4色カラー印字 ※受注生産



モノクロリボン(黒)印字

ハーフリボン(黒)印字




ピクトグラム印字

手軽に色分けできる 自動4色ペンライナー

OPTION

専用のユニット取付により、分包時に自動で用法別に4色のラインを引くことができます。これまで分包後にマーカーでラインを引いていた先生方の手間が省け、服薬コンプライアンス確保に役立ちます。

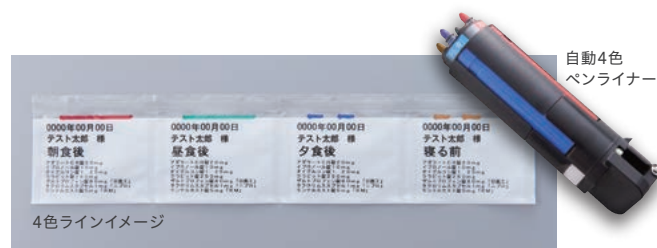

4色ラインイメージ


業務を楽に
これまで分包後に、マーカーでラインを引いていた先生方の作業負担を減らすことができます。

リーズナブル
導入しやすい価格で4色の色分け表示を実現できます。

情報量 約2.5倍※3
1色印字リボンとの併用により、印字可能域を確保し、必要な医薬品情報とカラーの両立を実現。

作業時間※1
1時間40分 → 0分

カラー印字コスト※2
約31.1%ダウン

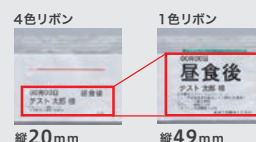

※1...3×14日分=42包を1処方とし、1日50処方と仮定した場合に、1処方のライン引きに2分を要するとして算出。

※2...4色印字リボン使用の場合と1色印字リボンに本オプションをあわせて利用した場合の1包あたりの印字コストを比較。インシャルコストは含んでいません。

※3...眠前含む4色ライン利用時の文字印字可能領域の比較。

切りやすく破れにくい ユヤマ分包紙

クリーニングリーダー®付分包紙 PAT.

ユヤマ独自の次世代分包紙「クリーニングリーダー®付分包紙」、セット時に先端部分がヒーターローラーをクリーニング！ 機械を長く使用いただくためのユヤマからのご提案です。



スパットカット® (意匠登録)

高カット性分包紙「スパットカット®」、薬包上部の圧着面のどこからでも簡単にカットできます。しかも、投薬時に輪ゴムで縛った際には切れにくい絶妙な処理が施されています。

横からもカット可能なノッチ
薬包サイドにも簡単カット処理！



分包された薬包には、横方向にも簡単カットしやすいノッチ(切れ目)が1包毎に自動で入ります。



UC…ユニバーサルカセット VC…バリアブルカセット TC…RFID錠剤カセット S…シャッター付


仕 様		全自動散薬分包機 Mini-R48				
型式	YS-48MR	YS-48MR-UC4VC40(S)-S または YS-48MR-UC4TC40(S)-S	YS-48MR-UC4VC48(S)-S または YS-48MR-UC4TC48(S)-S	YS-48MR-UC4VC54(S)-S または YS-48MR-UC4TC54(S)-S	YS-48MR-UC4	YS-48MR-UC8 または YS-48MR-UC8N
製品画像						
外形寸法	幅695×奥行430×高さ943mm	幅810×奥行704×高さ1,998mm(シャッター付) 幅810×奥行704×高さ1,900mm(シャッター無)			幅810×奥行704×高さ1,900mm	幅810×奥行704×高さ1,900mm 幅810×奥行704×高さ1,540mm(棚なし)
質量	約110kg	約240kg(シャッター付) 約230kg(シャッター無)			約216kg	約228kg 約212kg(棚なし)
消費電力	900VA(MAX)	1,000VA(MAX)				
電源	AC100V±10V(50/60Hz)					
搭載カセット数	—	M 32個、SS 8個	M 16個、SS 16個、SSS 16個	M 30個、SS 24個	—	—
分包モード	散薬、錠剤、錠剤・散薬混合、錠剤・散薬交互					
分包数	散薬：1～48包 錠剤：1～384包					
分包速度	56、51、45、40、35、23包／分(6段階切替)					
1包寸法	横(90、80、76、70、60mm)の5段階×縦70mm					
包装材料	セロファンポリ、グラシンポリ(2つ折り分包紙)※但し、透明グラシンは使用できません。					
分包紙交換の標準装備	ブルラウンド・ヒーターローラー方式					
手撒き錠剤マス数	48マス					
ロス袋	0～4包(操作端末にて切替可能)					
集塵機構	強・中・弱 3段階(操作端末にて切替可能)					
標準機構	制御用PC(PX Tab)	制御用PC(PX Tab)、RFID読み取り装置(錠剤カセット用)、バーコードリーダー				
使用環境	使用温度範囲10℃～ 35℃ 使用湿度範囲15% ～ 85%(ただし、結露なきこと) ただし、温度35℃のときは湿度48%以下、湿度85%のときは温度28℃以下でお使いください。 ※オプションの自動4色ペンライナーを使用している場合、温度範囲は10℃～ 30℃。					
オプション	PCアーム、6色LED手撒きガイド、自動4色ペンライナー、タブレバイザー、分包紙カバー、自動カッター、RFID読み取り装置(onedEX2連動用)、タブレット用キーボード、タブレット用タッチペン、地震対策金具、機械カバー、RFID読み取り装置(錠剤カセット用)、バーコードリーダー	PCアーム、6色LED手撒きガイド、自動4色ペンライナー、半錠対応UC(第二世代)、VCチェンジャー、セルフVCチェンジャー、タブレバイザー、分包紙カバー、自動カッター、RFID読み取り装置(onedEX2連動用)、タブレット用キーボード、タブレット用タッチペン、地震対策金具、錠剤カセット仕様用地震対策金具、機械カバー、シャッター機構			PCアーム、6色LED手撒きガイド、自動4色ペンライナー、半錠対応UC(第二世代)、タブレバイザー、分包紙カバー、自動カッター、RFID読み取り装置(onedEX2連動用)、自動カッター、RFID読み取り装置(onedEX2連動用)、タブレット用キーボード、タブレット用タッチペン、地震対策金具、錠剤カセット仕様用耐震金具、機械カバー、錠剤ケース(ユニエース共通)、追加棚、棚ワイヤー	

制御用PC(PX Tab)

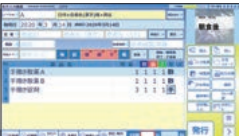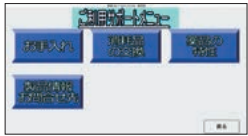
製品名	PX Tab(マルチ印字機能タイプ)	
入力画面	 処方入力画面  印字レイアウト選択画面  動画マニュアル画面	
印字方式	サーマルマルチ	
通信	可	
対応印字リボン	リフィルリボン モノクロ(黒)、ハーフ(黒)、4色(カラー)	
印字項目	患者コード、患者氏名、処方箋番号、診療科名、病棟名、用法、メッセージ、日付(西和暦)、引換券番号、薬品名、固定文字列、ピクトグラムグラフィックなど各種、バーコード、図形、検薬印字	
印字モード	連続、反復	
印字仕様	フリーサイズ・フリーフロント、印字レイアウトフリー、縦横印字可	
印字予約	制限なし	
Do登録数	最大10万件※1	
AV動画マニュアル	あり	

※1 但し、設定した期限を超過すると処方データは自動消去。(最大730日までの期限設定可能)

Mini-R48

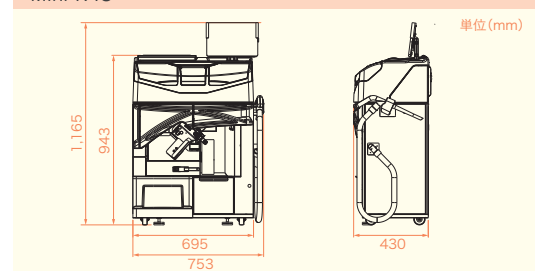

Mini-R48 錠剤カセット付(UC4TC48S-S)

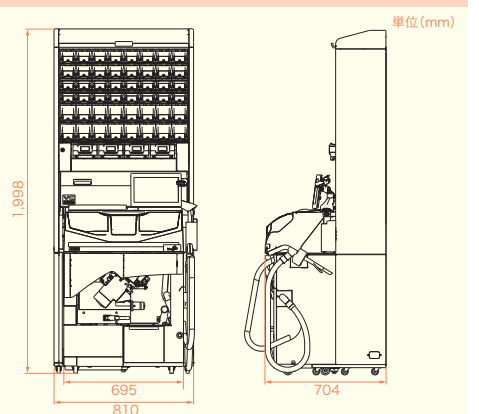



YUYAMAのSDGsへの取り組み これまで、これからも。

私たちYUYAMAは、SDGs達成に向け、
持続可能な社会実現を目指し、これからも
活動を続けていきます。

SDGs…持続可能な開発目標 (Sustainable Development Goals)。2015年9月の国連サミットにおいて採択された、2030年までに地球規模で解決すべき国際目標。17のゴール・169のターゲットから構成されています。

〈設置上のご注意〉

●本機は水平で安定した場所に設置し、屋外や水のかかる場所、直射日光の当たる場所や暖房器具の近く、冷風の当たる場所への設置は故障の原因となりますので避けてください。●本体後面通気ファンの通気のため、壁から10cm以上離して設置してください。●必要な電源容量はAC100Vです。同じコンセントから他の器具を同時に使用しないでください。また、アースを必ず接続してください。●その他、安全にお使いいただくために、取扱説明書をよくお読みになった上でご使用ください。



分包紙は別売となっております。弊社製純正分包紙をご使用ください。
なお、分包紙は紙のみが販売対象物であり、それを巻いている芯(樹脂製芯管)は、所有権を留保しており、分包紙を使い切る間、一時的に貸与させていただいております。ご利用後は、弊社または分包紙販売店の社員が回収にお伺いいたしますので、ユーザー様で保管し、第三者に対して売却、譲渡、貸与すること等を固くお断りいたします。



NSIPS®とは、日本薬剤師会が提案する薬局向け
コンピュータシステム間の連携システムです。
(商標登録 第5214610号)

Your Partner in Medication



製造元 **湯山製薬所**
株式会社

発売元 **ユヤマ**
株式会社

大阪本社 〒561-0841 大阪府豊中市名神口1丁目4番30号
TEL.(06)6868-5155(代) FAX.(06)6868-5154(代)
東京本社 〒130-0012 東京都墨田区太平2丁目10番10号
TEL.(03)3829-9511(代) FAX.(03)5611-2011(代)

カタログの掲載内容は2026年7月現在のものです。
製品の改良のため仕様・デザインを予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

ご購入に関するお問い合わせ・ご相談・お申し込みは下記へご一報ください。

ユヤマのホームページはこちら!!



世界各国のユーザー様の
活用事例はこちら!!



無償プレゼント実施中!

「開局でお手伝いできること」
「無菌製剤室を作ろう!」



(株)湯山製作所