

Silent...



小型包装品用高压蒸汽灭菌器

YS-A-C108

診療を妨げない、サイレント・クレーブ。

Silent...



診療中に不快感のない
静かな小型卓上型クレーブ。



超静音 PAT.

従来機に比べ、静音性に優れ、
運転音が診療業務の妨げになりません。



連続運転対応

連続運転に対応し、
従来よりも短時間で滅菌作業を完了できます。



イラストキーでカンタン設定

金属・布類・ゴム・液体など一目でわかるキー入力方式。



任意の日時指定・曜日指定で予約可能

完了時刻を入力して予約滅菌を行うことができます(実質無制限)。
また、曜日指定で複数日時での予約も可能です。



液体滅菌にも対応

コンパクトながら500cc3本の滅菌瓶が処理できます。

※液体は水のみ対応。その他薬液等の滅菌につきましては、
薬液製造メーカーにお問い合わせください。


15dBダウン

従来機
YS-A-C107J
65dB

洗濯機(1m)・掃除機(1m)

YS-A-C108
50dB

換気扇(1m)・静かな事務所

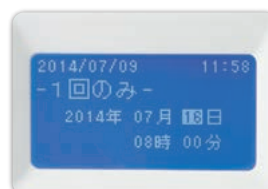

滅菌予約画面




500cc滅菌瓶

本体操作部

イラストキー+LED点灯で
操作しやすさに配慮。

LED点灯で選択モードが
一目でわかります。

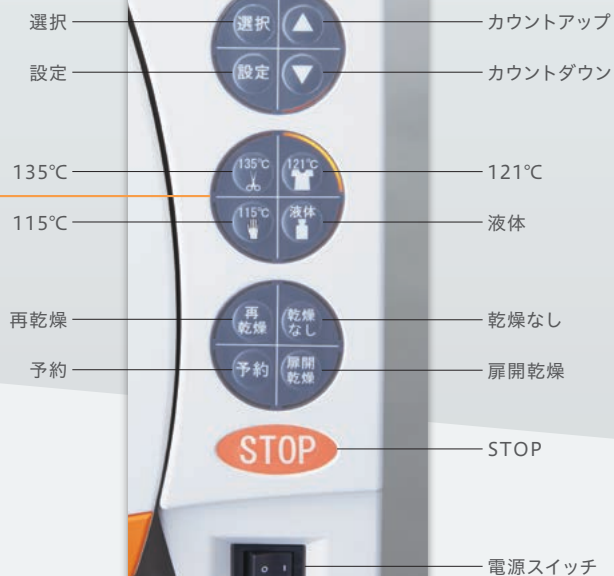

確かな滅菌をサポートします。

高性能フィルター

サーミスタ制御

ダブルヒーター

スチームリサイクル

自己診断装置

作業効率を考え、メンテナンス性も向上致しました。

給水・フィルター交換がカンタンに。

給水口・エアフィルターを前面に配置。
前面で給水・フィルター交換作業が行えるようになりました。



エアフィルター




給水口



エアフィルター

消耗品確認

ドアパッキン、エアフィルターと
いった定期交換部品の交換
時期を一目で確認できます。

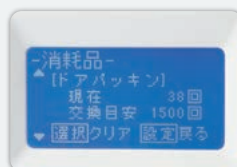

消耗品確認画面

運転履歴表示

前回の運転内容をモニター上で確認できます。
オプションのジャーナルプリンターを接続すれば、
運転記録の印刷も可能です。



ジャーナルプリンター印刷例




滅菌結果確認画面

仕 様

製品名	小型包装品用高圧蒸気滅菌器
製品型式	YS-A-C108
電源電圧	100V±10V 50/60Hz
薬事認証番号	226AABZX00088000
医療機器クラス	クラスII(特定保守管理医療機器)
EMC適合	JIS C 1806-1:2010 に適合
消費電力	1.2kVA ± 0.1kVA
外形寸法	幅426mm × 奥行469mm × 高さ366mm
チャンバー寸法	直径233mm × 奥行360mm(入り口直径217mm)
内容量	14.8リットル
乾燥質量	32kg
滅菌温度	135℃、121℃、115℃(115℃～136℃まで1℃単位で任意設定可能) 液体：121℃(固定) ※液体のみ、滅菌温度の変更は不可
滅菌時間	135℃：3分(標準)、121℃：20分(標準)、115℃：30分(標準)、液体：30分(標準、固定) 135℃：3分～、121℃：20分～、115℃：30分～99分まで1分単位で時間設定可能 ただし、液体は滅菌時間の変更不可
乾燥時間	初期設定値：30分(1分～99分まで1分単位で設定可能) ※液体滅菌の場合は、設定範囲が30分～99分
再乾燥時間	初期設定値：30分(1分～99分まで1分単位で設定可能)
最高使用圧力	0.25MPa
圧力計範囲	0～0.4MPa
給水タンク容量	3.7リットル
安全装置	過熱防止バイメタル、過熱防止サーミスタ、圧力安全弁、 扉インターロック、漏電ブレーカー、電流ヒューズ
騒音レベル	最大50dB以下(自社測定方法による測定値)
使用環境	屋内：温度10℃～35℃ 湿度15%～85%(ただし、結露なきこと) ※温度35℃の場合：湿度48%以下、湿度85%の場合：温度28℃以下 標高：0～2000m、過電圧カテゴリII(設置カテゴリII)、汚染度2
オプション	ジャーナルプリンター、ジャーナル用紙、滅菌ボトルラック(500ml用)、架台(パイプ)、 地震対策オプション(本体・架台)、別売りバスケット、丸カスト、角カスト(小・中)、給水漏斗

※液体滅菌は水のみ対応しています。その他薬液等につきましては薬液の製造メーカーにお問い合わせください。


付 属 品

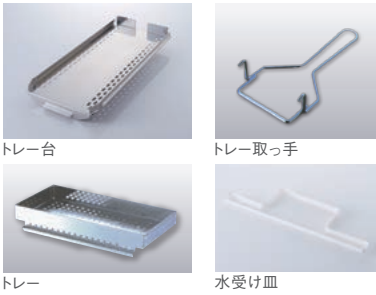

オプション



外 形 寸 法

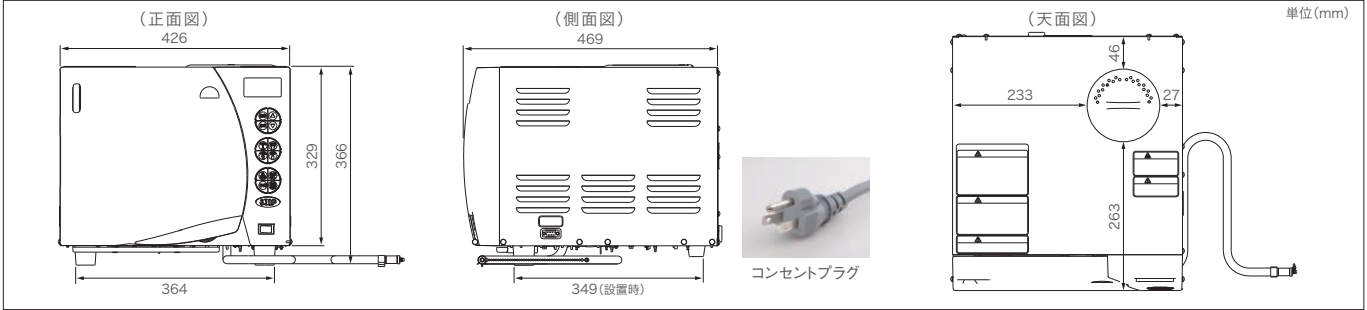

《 設置上のご注意 》

- アースを必ず接続してください。●直射日光の当たる窓際に設置しないでください。●水平に設置してください。●本体後面及び左右側面は、壁から5cm以上離してください。また、上部には、20cm以上の空間を設けて設置してください。●電源は、必ず専用コンセントを使用する。

耐震マットもご用意。

ユヤマクレーブは最新かつ細心の耐震対策を施しています。

地震大国、日本。記憶に新しいところでも、阪神淡路大震災や中越地震など、痛ましい被害を生んだ大規模な地震が思い起こされます。ユヤマクレーブでは、最下部に耐震専用金具を取り付け、耐震マットをオプションでご用意。



Your Partner in Medication



製造販売業者 株式会社 湯山製作所

販売業者 Z Y M

大阪本社 | 〒561-0841 大阪府豊中市名神口1丁目4番30号
TEL.(06)6868-5155(代) FAX.(06)6868-5154(代)
東京本社 | 〒130-0012 東京都墨田区太平2丁目10番10号
TEL.(03)3829-9511(代) FAX.(03)5611-2011(代)
[医療機器製造販売業許可番号]27B2X00001 [医療機器製造業許可番号]27B2D00564本社工場

カタログの掲載内容は2026年1月現在のものです。
製品の改良のため仕様・デザインを予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

ご購入に関するお問い合わせ・ご相談・お申し込みは下記へご一報ください。

ユヤマのホームページはこちら!!



世界各国のユーザー様の
活用事例はこちら!!



無償プレゼント実施中!
「開局でお手伝いできること」
「無菌製剤室を作ろう!」



(株)湯山製作所