

Your Partner in Medication

yuyama

シンプル＆コンパクト。
錠剤一包化に、新たな選択肢を。



小型錠剤分包機

MIND  **SE-8**

[ミ ン ド ー ズ - 8]

効率性と安全性を高いレベルで実現するコン

「ミンドーズ-8」は、錠剤一包化を散薬分包機で手撒き対応されている薬局様におすすめの錠剤専用分包機です。

標準装備された8個のユニバーサルカセット（UC）は、薬剤師の業務負担を軽減するとともに、調剤過誤防止による安心

手撒きの手間とリスクをなくすユニバーサルカセット（UC）を8個搭載

UCの使用 方法

01



前面パネルに患者名や投入薬品名を表示

02



バーコードリーダーで照合して



初めて投入可能に！

UCとは PAT.

さまざまな種類の錠剤を投入して
分包できる、ユヤマ独自の可変式カセットです。

あらゆる形状の
錠剤に対応します※



※掲載は一部です。※使用可能薬品には一部制限がございます。
詳しくはお問い合わせください。

POINT. 1

ロック機構と画面表示で 誤投入を防止

処方データを受信すると、液晶画面に患者名・薬品名・錠数を表示。さらに、
薬品ごとにGS1データバーを照合してUCのロックを解除するので、異なる
薬品の誤投入を防ぎます。



こんな便利な使い方も！

薬品固定での使用も可能（固定UC）

特定の薬品の分包頻度が高いときは、薬品を指定して、固定UCとしても使用可能。
状況に合わせてフレキシブルにお使いいただけます。

※UCには乾燥剤を入れられませんので、吸湿性の高い薬品を長期間滞留させることはおすすめしません。

オプション

半錠対応UC PAT.

整数錠と半錠のどちらも投入可能。
半錠の自動分包を実現します。


※1つのUC内に整数錠と半錠の
混在は不可です。



多錠半錠カッター（別売）
とも相性抜群!!

6色LEDガイド表示

用法ごとに6色で色分けガイド表示
することで、錠剤の手撒き間違いを
防ぎます。LEDは薬品ごとに撒くマス
のみを点灯させることも可能です。

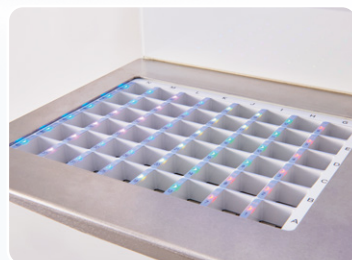

自動4色ペンライナー

分包と同時に自動で用法別に4色のライン
を引くことができ、作業負担を軽減します。



パクトな錠剤専用分包機。

お感をもたらします。



投入して再度セットで分包スタート




分包完了!

POINT. 2

薬品ごとに投入するだけで分包完了

薬品ごとに投入するだけで、錠剤の形状にあわせて払出口の形状が変化し、安全に分包できます。処方する薬品が多い場合も、8個のUCにより手撒きの必要がありません。

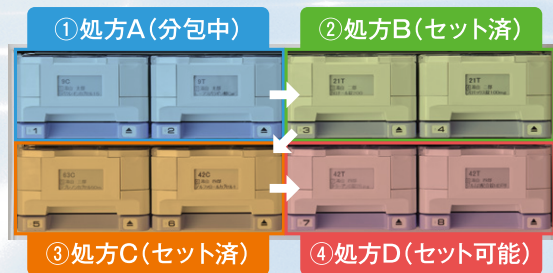

分包作業を効率的に

3つ先の処方まで割り当て可能

分包中の処方に加え、3つ先の処方まで割り当てが可能。処方ごとにセットする必要がなく、薬品投入作業をまとめて効率的に行うことができます。

清掃方法

UC

UCの上部は取り外しが可能。
薬品が触れる部分を分解し、清掃いただけます。

※薬品接触部分が
3つのパーツに分かれます。
※水洗いは不可です。



薬品経路

- ① 錠剤ホッパーと
 - ② 最終ホッパーは
- 取り外して清掃が可能です。

※水洗いはどちらも不可です。



※画像は自動4色ペンライナー付き

さらに、安全性を高める機能も! /

分包後は目視確認で残薬を確実に回収




カセットの使用後は、必ず
ロック解除スイッチを押して
カセットを取り出してください。
目視で残薬が無いかを確認
後、元に戻して初めて情報が
リセットされます。

■ 仕様

製品名	MINDOSE-8	分包数	1~999包
型式	YS-TR-CTDM-J	分包速度	UC処方：42包/分（MAX）
外形寸法	幅600mm×奥行565mm×高さ1,230mm (手撒き錠剤マスまでの高さ858.2mm)	1包寸法	横（60・70・76・80・90mmの5段階）×縦70mm
		包装材料	セロファンポリ（2つ折りタイプ）
質量	約110kg	手撒き錠剤マス数	48マス
消費電力	MAX480VA	ロス袋	5包
電源	AC100V ±10V 50/60Hz	オプション	自動4色ペンライナー・半錠対応UC・ 6色LEDガイド・ジャーナルプリンタ・タブレット用キーボード

■ 設置図面

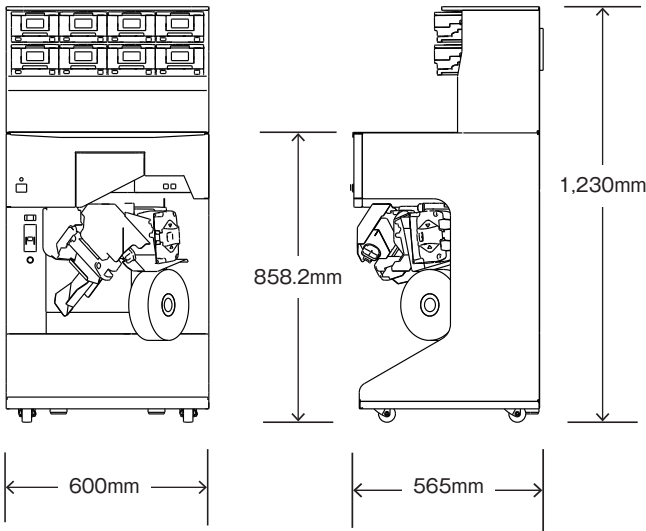

■ その他機能



- 【印字装置(PX.TAB)】
スタンド付きで、分包機周辺に置いて使用できます。
- 【バーコードリーダー】
マグネットが付いているため、本体に貼り付けて使用できます。角度調節も可能です。
※PX.TABと本体の接続はLANケーブル(標準3m)、PX.TABとバーコードリーダーの接続はUSBケーブル(標準2m)です。
- 【ジャーナルプリンタ(オプション)】
手撒き指示書が出力可能です。



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

YUYAMAのSDGsへの取り組み
これまで、これからも。

私たちYUYAMAは、SDGs達成に向け、持続可能な社会実現を目指し、これからも活動を続けていきます。

SDGs…持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)。2015年9月の国連サミットにおいて採択された、2030年までに地球規模で解決すべき国際目標。17のゴール・169のターゲットから構成されています。



分包紙は別売となっております。弊社製純正分包紙をご使用ください。
なお、分包紙は紙のみが販売対象物であり、それを巻いている芯(樹脂製芯管)は、所有権を留保しており、分包紙を使い切る間、一時的に貸与させていただいております。ご利用後は、弊社または分包紙販売店の社員が回収にお伺いいたしますので、ユーザー様で保管し、第三者に対して売却、譲渡、貸与すること等を固くお断りいたします。



NSIPS®とは、日本薬剤師会が提案する薬局向けコンピュータシステム間の連携システムです。
(商標登録 第5214610号)

Your Partner in Medication



製造元 **湯山製薬所** 株式会社
発売元 **ユヤマ** 株式会社

※「Your Partner in Medication」は株式会社湯山製薬所の登録商標です。

大阪本社 | 〒561-0841 大阪府豊中市名神口1丁目4番30号
TEL.(06)6868-5155(代) FAX.(06)6868-5154(代)

東京本社 | 〒130-0012 東京都墨田区太平2丁目10番10号
TEL.(03)3829-9511(代) FAX.(03)5611-2011(代)

カタログの掲載内容は2024年9月現在のものです。
製品の改良のため仕様・デザインを予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

ご購入に関するお問い合わせ・ご相談・お申し込みは下記へご一報ください。

ユヤマのホームページはこちら!!



世界各国のユーザー様の
活用事例はこちら!!



無償プレゼント実施中!
「開局でお手伝いできること」
「無償製剤室を作ろう!」

