

小型包装品用高圧蒸気滅菌器

YS-A-C106

小さなボディに、多彩な機能。
効率性を兼ね備えた
新しい卓上型オートクレーブ



速乾モードを新たに搭載

乾燥温度設定が4パターンに進化。
従来の「低温・標準・高温」モードに、
「速乾」モードが追加されました。
ヒーター温度200℃で、素早く乾燥
することができます。

※「速乾」モードは金属滅菌かつ未包装品の
場合のみ使用可能です。



連続運転・予約滅菌で効率UP



2025/01/10 14:52
- 1 回のみ -
2025年 01月 20日
08時 00分

▲滅菌予約画面

連続運転によって、待ち時間なく効率的に滅菌ができます。また、日時を指定しての予約滅菌機能も搭載。曜日指定で複数日時の予約も可能です。

イラストキーで操作性UP



滅菌は、下記の4つのモードをイラストキーで直感的に操作可能。

- 金属(135℃)
- 布類(121℃)
- ゴム(115℃)
- 液体

LED点灯で、選択モードも一目で確認できます。

メンテナンスもカンタン



エアフィルターは交換しやすい前面に配置。消耗品の交換時期は液晶パネルから確認できます。交換時期が近づくとお知らせする機能も搭載しています。

消耗品 -
[ドアパッキン]
現在 38回
交換目安 1500回
▼ 経過クリア 設定戻る

▲消耗品確認画面

コンパクトながら容量も確保



チャンバー内部は丸カスト(18cm)を2個入れられるサイズ。コンパクトなボディでも、業務の中で十分に活用いただけます。


仕様

製品名	小型包装品用高圧蒸気滅菌器
製品型式	YS-A-C106
電源電圧	100V±10V 50/60Hz
薬事認証番号	307AABZX00004000
医療機器クラス	クラスⅡ(特定保守管理医療機器)
EMC適合	JIS C 61326-1:2022 に適合
消費電力	1.2kVA
外形寸法	幅426mm × 奥行469mm × 高さ366mm (但し、部分突起物を除く)
チャンバー寸法	直径233mm × 奥行360mm (入り口直径217mm)
内容量	14.8リットル
質量	約35kg
滅菌温度	135℃、121℃、115℃(115℃～136℃まで1℃単位で任意設定可能) 液体：121℃(固定) ※液体のみ、滅菌温度の変更は不可
滅菌時間	135℃：3分(標準)、121℃：20分(標準)、115℃：30分(標準)、液体：30分(標準、固定) 【時間設定】135℃：3分～、121℃：20分～、115℃：30分～99分まで1分単位で可能 ※液体のみ、滅菌時間の変更は不可
乾燥時間	初期設定値：30分(1分～99分まで1分単位で設定可能) ※液体のみ、設定範囲が30分～99分
再乾燥時間	初期設定値：30分(1分～99分まで1分単位で設定可能)
最高使用圧力	0.25MPa
圧力計範囲	0～0.4MPa
給水タンク容量	3.7リットル
使用する水	水道水
安全装置	過熱防止バイメタル、過熱防止サーミスタ、圧力安全弁、扉インターロック、漏電ブレーカー、電流ヒューズ
騒音レベル	55dB(A)以下(自社測定方法による測定値)
オプション	架台(パイプ・ボックス)、地震対策オプション(本体・架台)、バスケット、丸カスト、角カスト(小・中)

※液体滅菌は水のみ対応しています。その他薬液等につきましては薬液の製造メーカーにお問い合わせください。

〈正面・側面図〉

単位:mm

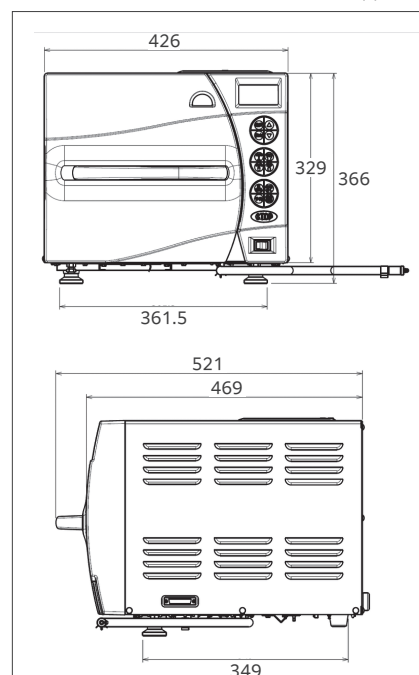

〈設置上のご注意〉

- アースを必ず接続してください。
- 直射日光の当たる窓際に設置しないでください。
- 水平に設置してください。
- 本体後面及び左右側面は、壁から5cm以上離してください。
また、上部には、20cm以上の空間を設けて設置してください。
- 電源は、必ず専用コンセントを使用してください。



製造元 湯山製薬所
株式会社
発売元 **ユヤマ**
株式会社

大阪本社

〒561-0841 大阪府豊中市名神口一丁目4番30号
TEL.(06)6868-5155(代) FAX.(06)6868-5154(代)

東京本社

〒130-0012 東京都墨田区太平二丁目10番10号
TEL.(03)3829-9511(代) FAX.(03)5611-2011(代)



弊社HPIはこちら

掲載内容は2025年4月現在のものです。製品の改良のため仕様・デザインを予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

[医療機器製造販売業許可番号]27B2X00001[医療機器製造業許可番号]27B2200564本社工場