

もっと、患者様の近くへ。

Ver.1.0

クラウドで「つながる」、未来の
保険薬局向け調剤支援システム

YUNICOM
zero

調剤室での操作は、限りなく **ゼロ** に近づきます。

これまでの保険薬局向け調剤支援システムYUNiCOM-DSxをさらに進化させた、YUNiCOM-zero。
調剤室での機器操作を自動化、もしくは非薬剤師の方にお任せできるようにすることで、
変化するこれからの対人業務への時間創出を支援します。 PAT.P

窓口



レセコンからYUNiCOM-zeroへ
処方データを送信



YUNiCOM-zero上で薬剤師が
処方監査・調剤設計・調製指示

調剤室



機器を自動で動作開始
させたり、非薬剤師の
方が機器操作したり
することも可能に！



▲処方展開画面

▲調剤設計画面


処方展開画面から、調剤設計メニューを開き
下記の項目を設定。機器側の作業は不要です！

- ・印字レイアウト
- ・印刷順序（連続/反復）
- ・分包紙幅
- ・ペン印字の有無

設定したのち「発行」ボタンをクリックするだけで、散薬分包機や錠剤分包機など、各種調剤機器に処方データを振り分けて送信します。

クラウドで「つながる」価値を提供します。

YUYAMA

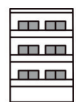

YUNICOM

クラウドサービス

- …処方発行～調剤
- …調剤後
- …リモート接続

薬局



調剤機器



YUNiCOM-zeroは、クラウドのシステムです。内規や調剤設計もクラウド上で処理し、薬局内のYUNiCOM-zero端末を通して各調剤機器に処方データを振り分けて送信します。

また、YUYAMAがYUNiCOM-zeroを通して薬局様と「つながる」リモート対応が可能です。YUNiCOM-zeroの設定変更や障害対応もYUYAMAから作業ができます。さらに、機器へのマスタ配信も自動で行えます。

そのほか、クラウドサービスを活かした機能を順次リリース予定です。

トレーサビリティを確保。

ロット管理画面

調剤日: 2025/01/01 ~ 2025/02/03

ロット番号: [検索] [ヘルプ]

検索条件: ●薬品名 ○薬品コード ○Vコード
マゾシド錠330mg [ヘルプ]

絞り込み 同一薬品の複数ロット検索は、ロット番号を入力せず薬品で全ロット検索後、絞り込み画面で選択抽出してください。 [絞り込み] [絞り込み解除]

薬品名	ロット番号	患者ID	患者名	調剤日	処方施設区分	オーダー番号	患者: xx人	処方番号
マゾシド錠330mg	000003	1000000101	テスト 太郎	2025/01/01	外発	N000000001	100	A
マゾシド錠330mg	000003	1000000101	テスト 太郎	2025/01/14	外発	N000000011	110	
マゾシド錠330mg	000003	1000000201	テスト 花子	2025/01/21	施設A	N001100001	200	
マゾシド錠330mg	000001	1000000101	テスト 太郎	2025/01/01	外発	N000000001	100	
マゾシド錠330mg	000001	1000000101	テスト 太郎	2025/01/14	外発	N000000011	110	
マゾシド錠330mg	000001	1000000201	テスト 花子	2025/01/21	施設A	N000100001	200	
マゾシド錠330mg	000002	1000000101	テスト 太郎	2025/01/01	外発	N000000001	100	
マゾシド錠330mg	000002	1000000101	テスト 太郎	2025/01/14	外発	N000000011	110	
マゾシド錠330mg	000002	1000000201	テスト 花子	2025/01/21	施設A	N000100001	200	
マゾシド錠330mg	000002	1000000101	テスト 太郎	2025/01/14	外発	N000000011	110	

ロット管理機能で、各調剤機器で管理されている薬品のロット情報を一括検索！薬品ごとだけでなく、患者様ごとに情報を集約することもできます。

調剤の進捗も一目で確認。

調剤日: 2025/02/05

進捗状況: [完了] [未完了] [患者:]

引換番号	受領済	患者ID	患者氏名	処方施設	中央処理	錠剤分包機	BG	数値値
0099		999999999	テスト 患者	—	✓	✓	—	✓
0076		999999999	テスト 患者	✓	✓	—	—	—
0075		999999997	テスト 患者	✓	✓	—	—	—
0074		999999996	テスト 患者	✓	✓	—	—	—
0073		999999995	テスト 患者	✓	✓	—	—	—
0072		999999994	テスト 患者	—	—	—	—	—

調剤進捗管理機能も搭載。多数の処方データを並行して処理している中でも、調剤漏れや遅延がないかを一目で把握することが可能に！

YUNiCOM-zeroで目指す zero for Pharmacist

目指すのは、薬剤師の先生方が調剤作業に関わる時間を限りなくゼロに近づけつつ、薬物療法の安全性と質の向上に貢献すること。調剤機器の操作を安心してどなたかに任せられる仕組みを通じ、対人業務に専念できるよう、新しいスタイルをご提案します。それが、YUYAMAの目指す新調剤コンセプト「zero for Pharmacist」。

調剤の未来を切り拓くことを信じて。



製造元
株式会社

湯山製薬所

発売元
株式会社

ユヤマ

大阪本社 〒561-0841 大阪府豊中市市名神口1丁目4番30号 TEL.(06)-6868-5155(代)
東京本社 〒130-0012 東京都墨田区太平2丁目10番10号 TEL.(03)-3829-9511(代)

ユヤマHPは
こちらから！

