

刻印判別機能搭載！

	1包目	2包目	3包目	4包目	5包目	6包目	7包目	8包目	9包目	10包目	11包目	12包目	13包目	14包目
	朝食後	朝食後	朝食後	朝食後	朝食後	朝食後	朝食後	朝食後	朝食後	朝食後	朝食後	朝食後	朝食後	朝食後
タイプ	CAS	CAS	CAS	CAS	CAS	CAS	CAS	CAS	CAS	CAS	CAS	CAS	CAS	CAS
	SD 112	SD 112	SD 112	SD 112	SD 112	SD 112	SD 112	SD 112	SD 112	SD 112	SD 112	SD 112	SD 112	SD 112
	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	SWNF CR20	SWNF CR20	SWNF CR20	SWNF CR20	SWNF CR20	SWNF CR20	SWNF CR20	SWNF CR20	SWNF CR20	SWNF CR20	SWNF CR20	SWNF CR20	SWNF CR20	SWNF CR20

**10/1
RELEASE**

鑑査支援機能付き
全自動錠剤分包機

Litrea II
リトゥア アイ Ⅱ

PROUD II
プロウド アイ Ⅱ




従来の鑑査支援機能付き全自動錠剤分包機がリニューアル！

分包直前に機械内部で撮影した錠剤の画像を分析し、薬品ごとに一行に整列表示。
刻印を読み取って薬品を判別し、正確な鑑査業務をサポートします。



識別率は**95%以上！** ※

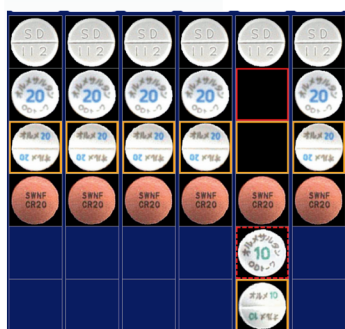

薬品間違いも色分けして表示。どこが間違っているか、一目で確認できます。高い精度で間違いを判別可能なため、安心して鑑査を行っていただけます。

※当社規定の測定方法による



刻印部分の**強調表示**も！



色の濃い薬品や、薄い刻印で文字が見えにくい場合も、画面上で強調表示が可能です。薬品の色に合わせて、文字色も黒・白・青・黄色から選択できます。



▲選べる文字色

鑑査支援ソフトJSD-i・鑑査支援PC仕様

- ・刻印判別機能使用時、分包速度は最速**40包/分**です。
- ・鑑査結果履歴の保存期間は**100日以上**です。
- ・カプセルは刻印ではなく色、形、サイズで判定します。
- ・マスタはVPNもしくはDVDにて配信します。

鑑査支援ソフトJSD-iは、分包機に外付けの鑑査PCによって解析を行います。

※鑑査PC専用BOX（オプション）を使用した場合の画像です。



選べる鑑査支援機能付き錠剤分包機

刻印判別機能対応機種は2種類。本体サイズやカセット数で、運用に合わせてお選びいただけます。



Litrea II
リトリア アイ 2

- 本体サイズ
幅660mm×
奥行691.5mm×高さ1,982mm
- カセット数
130個（M:66個、SS:50個、
SSS:14個）など



PROUD II
プラウド アイ 2

- 本体サイズ
幅890mm×
奥行943mm×高さ2,090mm
- カセット数
216個
（M:168個、SS:48個）など

錠剤は3種類の機構から払い出します

鑑査支援機能だけでなく、払い出しも安全に行える機構を備えて、調剤過誤防止に貢献します。


錠剤カセット

従来の固定式カセットと、
現場で薬品変更可能なV C
（バリアブルカセット）の
2種類をご用意。



UC（ユニバーサルカセット）

様々な種類の錠剤を払い出すことができる
カセットです。ロック機構がついており、
薬品のGS1データバーの照合を行って初め
てロックが外れます。

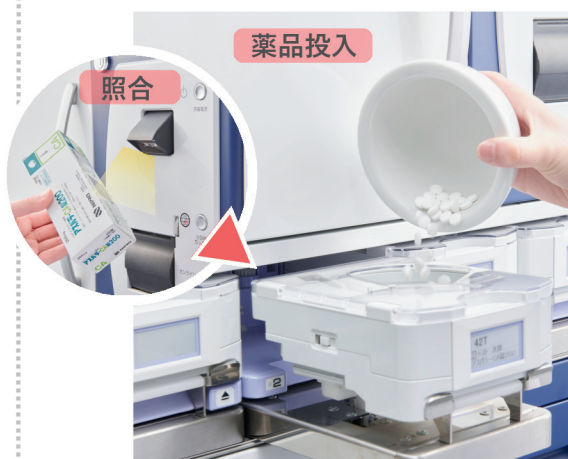

手撒きユニット

手撒きが必要な薬品も用法ごとや
薬品ごとに6色のLEDガイドで
表示させ、手撒き作業を安全にで
きるようにサポートします。



製造元 株式会社 湯山製薬所 発売元 株式会社 ユヤマ

大阪本社 〒561-0841 大阪府豊中市名神口1丁目4番30号 TEL.(06)-6868-5155(代)
東京本社 〒130-0012 東京都墨田区太平2丁目10番10号 TEL.(03)-3829-9511(代)

ユヤマHPは
こちらから！

