

# PXTab 袋長設定について

お使いの分包機で、袋長（薬包1包の長さ）を変更したい場合は以下の手順に沿っておこなってください。


対応機種	• Twin-R93 III	• Twin-R93 IV	• Twin-R93V	• Single-R93z II	• Single-R93 III
	• SR-zero	• Mini-R45	• Mini-R48	• charty-III	• charty-IV
	• Reno-S	• MINDOSE-8			

① 「80mm」など、サイズが表記されているボタンをタップすることで、袋長を選択する画面が開きます。

※「処方入力画面」を例として説明します。



②使用する袋長をタップします。  
袋長選択画面が閉じます。

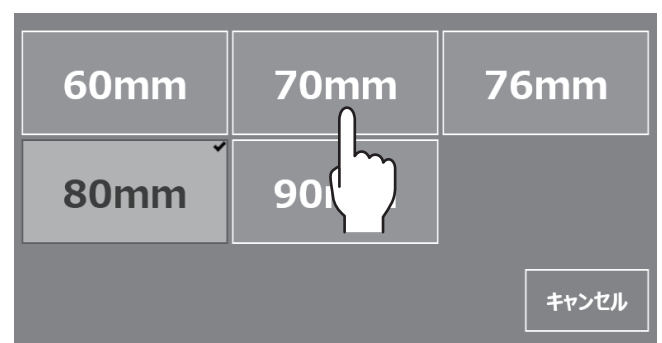

③処方入力画面の「袋長」と「印字イメージ」に設定内容が反映されますので、確認してください。




# JSD.NET 袋長設定について

お使いの分包機で、袋長（薬包1包の長さ）を変更したい場合は以下の手順に沿っておこなってください。

対応機種	• Litrea II SE	• Litrea II SE-t	• Litrea III	• Litrea IV	• Litrea V
	• PROUD	• PROUD-VC	• PROUD II		
	• Litrea-i	• Litrea-i II	• PROUD-i	• PROUD-i II	

- ① 「80mm」など、サイズが表記されているボタンをタップすることで、袋長を選択する画面が開きます。  
※画面は「処方入力画面」を例として説明します。

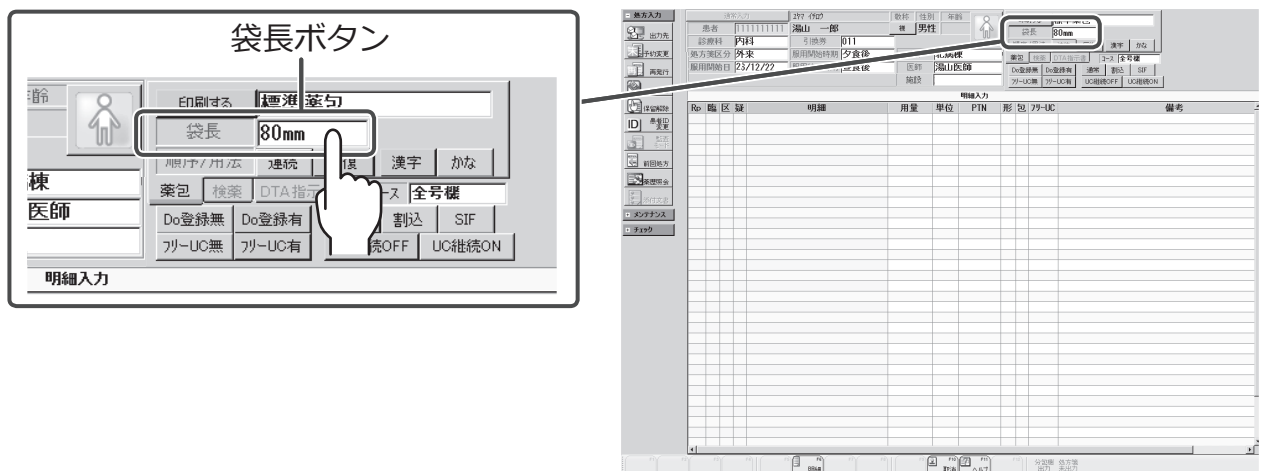

- ② 使用する袋長をタッチすると、変更後のサイズが反映されます。

